

*2021 年 4 月 (第 3 版)

2016 年 11 月 (第 2 版) (新記載要領に基づく改訂)

製造販売届出番号 11B3X00094000200

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

*NK綿棒小 4 K70-7106

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：日本綿棒株式会社

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済医療用綿棒です。

綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡

軸部の材質：紙製

寸法：全長 303mm/綿球径 6.4mm/軸の直径 3.2mm

販売元：ケンツメディコ株式会社

埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1

TEL 0495-71-1001

*【使用目的又は効果】

薬剤の塗布や治療のため、或いは検査などに使用する。

*【使用方法等】

綿球部分を汚染しないように個包装を開けて適宜使用する。

*【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 1) 本品は滅菌済ですので、個包装に破れや穴などがあった場合には使用しないでください。
- 2) 包装を開封した後は速やかに使用してください。
- 3) 本品の使用は 1 回限りです。再使用しないでください。
- 4) 本品を使用するときは、力を入れすぎたり、強く押し下りして綿棒の軸を折らないようにご注意ください。
- 5) 検体を直接採取する場合は、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう無理な力をかけないでください。
- 6) 使用後は感染防止のために、検査室等の感染性廃棄物の処理規定に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

[自己認証(社内データ)による]