

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

メンテ IPP 舌圧子 TD-15

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は天然木を細長い板状に加工した製品です。

寸法 153mm×18mm

【使用目的又は効果】

口腔内、咽喉内の検診等に使用する。

【使用方法等】

口腔内に挿入し、舌を押さえるために使用する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 本品は未滅菌です。
- 本品の使用は 1 回限りです。
- 使用先の部位を傷つけないよう無理な力をかけないでください。
- 製品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本綿棒株式会社

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884