

機械器具 54 医療用捲綿子  
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

## メンテ IPP 病院用綿棒 1P1508-10 本入

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本綿棒株式会社

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済医療用綿棒です。

綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡

軸部の材質：紙製

寸法：全長 150mm/綿球径 8.0mm/綿球長 14mm/軸の直径 2.5mm

#### 【使用目的又は効果】

薬剤の塗布や治療のため、或いは検査などに使用する。

#### 【使用方法等】

使用する直前に包装を開けて適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 本品は滅菌済ですので、包装に破れや汚染している疑いがある場合には使用しないでください。
- 包装を開封した後は速やかに使用してください。
- 本品の使用は 1 回限りです。
- 本品を使用するときは、力を入れ過ぎたり、強く押し下りして軸を折らないようにご注意ください。
- 製品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使用しないでください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

〔自己認証（社内データ）による〕