

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

メンテ IPP 病院用綿棒 100P1010 ポリ袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた医療用綿棒です。

綿球部の材質：コットン 100%

軸部の材質：紙製

寸法：全長 108mm/綿球径 11mm/綿球長 22mm/軸の直径 2.6mm

【使用目的又は効果】

薬剤の塗布や治療のため、或いは検査などに使用する。

【使用方法等】

適宜使用する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 本品は未滅菌綿棒です。
- 本品の使用は 1 回限りです。
- 使用先の部位に無理な力をかけて軸を折らないようにご注意ください。
- 製品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本綿棒株式会社

埼玉県熊谷市江波 412

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884