


器01 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

## レトラクターフック

## 【形状・構造及び原理等】

## ＜形状、構造＞

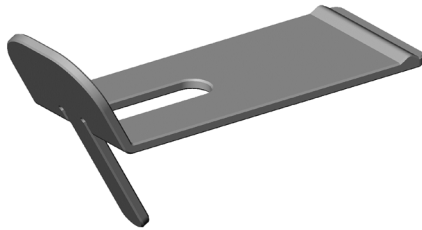

材質:ステンレス鋼

## ＜原理等＞

レトラクターとクランプユニット間に装着し、レトラクターを意図する位置に保持する。

## 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

## 【使用方法等】

創口を広げたレトラクターに本品のフック部を装着する。  
手術台に取り付けたクランプユニットで本品をクランプ、保持する。  
本品は未滅菌のため、使用前に滅菌を行うこと。

## ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) 折損、曲がり等の原因になり得るので、必要以上の無理な力を加えないこと。
- (2) 滅菌前に本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- (3) 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- (4) 使用後は、付着した血液、体液、組織及び薬品が乾燥して固着しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。
- (5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因となるので、使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

## 【使用上の注意】

## ＜不具合・有害事象＞

本品の使用により以下の不具合・有害事象が起こり得る。

- (1) 重大な不具合  
1) 本品の破損、変形

## 【保管方法及び有効期間等】

## ＜保管方法＞

- (1) 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

## 【保守・点検に係る事項】

## ＜使用者による保守点検事項＞

- (1) 本品使用前に、キズ、折れ、曲がり、欠け等の不具合がないか点検すること。
- (2) 本品使用後は、直ちに血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のため、洗浄・滅菌処理を行うこと。
- (3) 汚染除去に用いる洗剤は、中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- (4) 強アルカリ・強酸性洗剤は器具を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
- (5) 磨き粉や金属タワシで器具の表面を磨かないこと。
- (6) 器具に付着した洗剤・消毒剤等は浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化

等)で完全に洗い流すこと。

- (7) 洗浄後は直ちに乾燥させること。
- (8) 下記の滅菌条件が推奨される。

滅菌方法: 高圧蒸気法

滅菌条件: 121℃ 15分間

126℃ 10分間

134℃ 3分間

## ＜業者による保守点検事項＞

- (1) 本品使用前後に、キズ、折れ、曲がり、欠け等の不具合がないことを点検すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

西島メディカル株式会社

電話 : 0561-37-1222