



2022 年 7 月 (第 1 版)

届出番号: 13B2X10008000131

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 単回使用鼻用クリップ JMDN: 10907000

GVS ノーズクリップ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用、消毒、滅菌はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

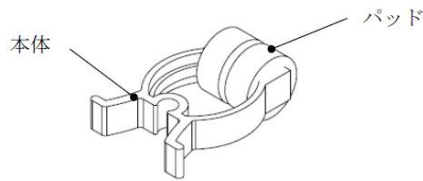

原材料: POM 樹脂、EVA 樹脂

<原理>

肺機能検査時に本品で鼻を挟むことで、鼻孔を通して流れる空気を抑え、マウスピースから空気が流れるようにする。

【使用目的又は効果】

本品は肺機能検査時、鼻孔を通して空気が流れるのを抑え、マウスピースを通して空気が確実に流れるようにするために用いる。
本品は、単回使用である。

【使用方法等】

- (1) 製品への汚染を防ぐために、包装は使用直前に開封する。
- (2) 本体のツマミ部分の操作によりパッドの間隔を拡げて、被験者の鼻に装着する。
- (3) 本品のパッド部分の位置を調整し、パッドが適切に鼻孔を塞いでいることを確認する。
- (4) 肺機能検査後、本体のツマミ部分の操作によりパッドの間隔を拡げて鼻から外す。
- (5) 使用後は、適切に廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 使用前に、包装の破損、本品外観上の損傷、汚れや動作不良がないことを確認すること。
- (2) 再使用はしないこと。
- (3) 消毒、滅菌はしないこと。[変形・破損等により本品の機能が損なわれる可能性があるため。]
- (4) 過度な負荷をかけないこと。[変形・破損等により本品の機能が損なわれる可能性があるため。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて、5℃～40℃で保管すること。

<有効期間>

製造後 5 年

<使用の期限>

包装上に記載。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GVS ジャパン株式会社

TEL (03) 5937-1447

外国製造業者:

GVS フィルタテクノロジー (英国)

GVS Filter Technology UK