

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012

GVS 呼吸回路用コネクタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用、洗浄、滅菌はしないこと。

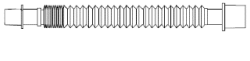
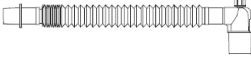
*【形状・構造及び原理等】

本品は未滅菌、単回使用である。

本品には、以下の種類がある。

分類	機能及び用途
カテーテルマウント	柔軟性のあるチューブによって、回路を延長し、接続する各種コンポーネントの位置を自由に設置して、使用中に回路等から受ける荷重を軽減することができる。 患者側端はストレートの他に、各種エルボコネクタを予め接続し組み立てたものがある。 機械側端は併用する他の医療機器(呼吸セット又は呼吸管)の患者接続口に合わせて、22F と 15M の 2 種類がある。
エルボコネクタ	L 字に曲がった形状のコネクタで、回路を患者に対して平行に設置することができる。 接続ポートが回転しない固定型とダブル回転型があり、ガスのサンプリングポートの有無がある。主として呼吸回路に使用するダブル回転型のサンプリングポートは、喀痰の吸引ポートを兼ねている。

*<形状・構造>

カテーテルマウント (代表例)	
ストレート	エルボコネクタ付き
	
チューブ種類: ①コルゲート型 ②エキスパンドル型 ③スムースボア型	
チューブ公称サイズ: 長さ 150 又は 200 mm、内径 15 mm	
患者側コネクタ: ストレート又はエルボコネクタ(①②③)	
接続部: 機械側 22F 又は 15M、患者側 22M/15F (ISO 5356-1)	
原材料: EVA+LDPE、EVA+PP、PVC (チューブ)、PP、PC (コネクタ)、PVC (キャップ)	

*寸法表 (単位 mm、公差±10%)

種類	公称サイズ	患者側コネクタ (記号表記)	全長 (種類②は公称長さ)	機械側接続部 患者側22M/15F
①	150	—	210	22F
	150	E1, E2	207	
	150	E3	218	
	150	—	201	15M
	200	—	251	
	200	E1, E2	248	
	200	E3	259	
②	150	—	135 ~ 210	22F
	150	E1, E2	132 ~ 207	
	150	E3	143 ~ 218	
	200	E3	153 ~ 268	15M
	200	—	136 ~ 251	
	200	E1, E2	133 ~ 248	
	200	E3	144 ~ 259	
③	150	E3	218	22F
	200	E3	268	
	150	E3	209	15M

エルボコネクタ		
①ポート無	②ポート有	③ダブル回転型
		
接続部: 15M - 22M/15F (ISO 5356-1)		
原材料: PP、PVC (キャップ)		

※PVC には、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用している。

<原理>

本品は、呼吸回路と気管チューブ若しくは気管切開チューブ、顔面マスク他の呼吸回路のコンポーネントの間に接続して、患者・呼吸回路の動きとそれに伴うテンションが接続部にかからないようにすることで呼吸回路等の接続外れや、チューブの事故抜管を防ぐことができる。

【使用目的又は効果】

呼吸回路と気管チューブ若しくは気管切開チューブ、顔面マスク他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いる。

【使用方法等】

- (1) 使用する直前に包装を開封し、本品を取り出す。
- (2) 呼吸回路の患者側接続部と、気管内チューブ等の機器側接続部の間に接続する。
- (3) 接続部すべてについてリークがないことを確認する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 使用前に、本品に破損や汚損がないことを確認し、異状が認められた場合は使用しないこと。
- (2) 本品は、訓練を受けた者だけが使用すること。
- (3) 接続部はしっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
- (4) 液体または分泌物が蓄積されていないかを、定期的に確認すること。
- (5) サンプリングポート／吸引ポートのキャップは、使用後必ず元に戻すこと [一回換気量を減少させ、分泌物を放出させるため]。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて、-10℃～40℃で保管すること。

<有効期間、使用の期限>

包装上に記載。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GVS ジャパン株式会社 TEL (03) 5937-1447

外国製造業者:

ニンボーファクンメディカルイクイップメント (中国)
NINGBO HUAKUN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.