

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 麻酔回路セット (70567000)、(呼吸回路セット (70566000))

GVS 麻酔呼吸回路セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用、洗浄、滅菌はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は未滅菌、単回使用である。
セットには、以下の構成品の組み合わせがある。

構成品組合せ				
タイプ	人工呼吸回路	エルボコネクタ	保護キャップ	付属品記号(参考)
1	○	×	×	- (なし)
2	○	×	○	C
3	○	○	×	E*
4	○	○	○	EC

※数字 1/2/3 を付してエルボコネクタの種類を示す (E1/E2/E3)。

<形状・構造>

人工呼吸回路	
成人用：呼吸管公称全長 1.8 m、内径 22 mm	
小児用：呼吸管公称全長 1.5 m、内径 15 mm	
接続部(ISO 5356-1)：機械側 22F - 患者側 22M/15F	
原材料：EVA+LDPE、EVA+PP、PVC (チューブ)、PP/PVC (アダプタ)、PP (保護キャップ)	
※PVCには、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用している。	
コルゲート型	
エクспанダブル型	
スムーズボア型	
ダブルルーメン型 (エクспанダブルカフ付) ※成人用のみ	
呼吸管 0.5m	
※Y ピース	※保護キャップ

エルボコネクタ ※患者側端 22M / 15F		
ポート無 (E1)	ポート有 (E2)	ダブル回転型 (E3)

<原理>

麻酔器又は人工呼吸器から送気される空気または酸素を含む医用ガスは、呼吸回路の吸気管を通り患者へ送られる。患者から排出される呼気は呼気管を通り麻酔器または人工呼吸器に戻される。

【使用目的又は効果】

麻酔器又は人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

- (1) 使用する直前に包装を開封し、本品を取り出す。
- (2) 長さ調節可能な呼吸管(エクспанダブル型)を使用する場合は、両手で呼吸管を握り、コネクタや接続部が外れないよう、適切な長さに調節する。
- (3) 呼吸回路を麻酔システムもしくは人工呼吸器に接続する。
- (4) 接続部すべてについてリークがないことを確認する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 使用前に、本品に破損や汚損がないことを確認し、異状が認められた場合は使用しないこと。
- (2) 本品は、訓練を受けた者だけが使用すること。
- (3) 接続部はしっかりと接続し、リークがないことを確認すること。
- (4) 液体または分泌物が蓄積されていないかを、定期的に確認すること。
- (5) サンプリングポートのキャップは、使用後必ず元に戻すこと [一回換気量を減少させ、分泌物を放出させるため]。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて、-10℃～40℃で保管すること。

<有効期間、使用の期限>

包装上に記載。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GVS ジャパン株式会社
TEL (03) 5937-1447

外国製造業者：

ニンボーファクンメディカルイクイップメント(中国)
NINGBO HUAKUN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.