

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN : 70976000)


ALLONE NITRILE GLOVE (オールワン ニトリルグローブ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

主原料: 合成ゴム(アクリロニトリルブタジエンゴム)
本品は指先にエンボス加工を施した、パウダー(滑材)なしの非天然ゴム製の使い捨て検査・検診用手袋である。また本品は、未滅菌の左右兼用手袋である。

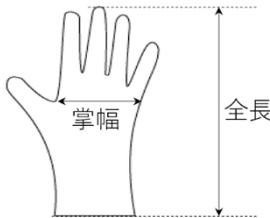

【主要寸法】

掌幅:
XS=70 / S=80 / M=95 / L=110 (±10) mm
全長:
230 mm 以上
厚さ:
0.05 mm 以上

【性能】

試験項目	老化前	老化後
引張強度(MPa)	14 以上	14 以上
切断時の伸び(%)	500 以上	400 以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する。

【使用方法等】

*小箱上部のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

- 体質などによりかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状が現れる場合があるため、その際は使用を中止すること。(使用後に発症する遅延性アレルギーを含む。)
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等には近づけないこと。
- 化学療法薬剤に対する曝露の防止を目的として本品を使用する場合は、使用する化学療法薬剤に合わせた適切な種類のグローブを選択すること。
- 本品に対して実施された化学療法薬剤の浸透に対する抵抗性試験結果を参照して本品を使用する際には、当該試験の臨床使用状況に適合することをカタログ等で確認した上で使用すること。併せて、使用する化学療法薬剤の安全性データシート又は添付資料を確認すること。
- 本品は、強い刺激性を有する化学物質の直接曝露に対する適用を目的とする製品ではないため、そのような目的で使用しないこと。

【重要な基本的注意】

鋭利な器具等に触れると本品に穴が開いたり破れる恐れがあるため注意すること。

【相互作用】

薬品・溶剤等、強い化学薬品によっては膨潤や浸透する可能性があるため、使用の際は十分確認を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 水濡れに注意し、高温・多湿・および直射日光、蛍光灯等の紫外線を避け、室温で保管すること。
- オゾンを生じさせる機器の近くを避け、出来るだけ箱包装のまま保管すること。

【有効期間】

包装材に記載のとおり。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名及び名称等】

(1) 製造販売業者(緊急連絡先):

日本ヒューマンメディック株式会社
住所: 大分県大分市賀来北2丁目16番34号
電話: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470

(2) 外国製造業者:

TOP GLOVE SDN. BHD. (マレーシア)
BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD (中国)
*INTCO MEDICAL INTERNATIONAL (HONG KONG)
CO.,LIMITED (中国)

日本ヒューマンメディック株式会社