

2024 年 6 月作成 (第 1 版)

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (JMDN コード : 31776000)

【ミラーホルダー】

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造等〕

1. 形状

2. 材質・組成
ステンレス

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内審査又は圧排のために用いる
歯科用器具である。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済かどうか確認する事。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 132℃以下厳守。)
- ミラー（弊社製品に限る）を装着し、通法に従い操作する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・オートクレーブ滅菌をすること。
- 使用目的以外での使用はしないこと。
また、破損、曲がり等の原因になり得るので
使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 塩素系およびヨウ素系消毒剤は腐食の原因
になるので、使用中に付着した際はできるだけ
早めに洗浄すること。
- 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの
過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者
には、使用を中止し医師の診断を受けさせる
こと。
- 破折等による誤飲の恐れがあるので、以下は
行わないこと。
①本品に対する曲げ・切削・加圧等。
②粗雑な扱い。(キズをつける・落下させる・
強い衝撃を与える等)
③バーナ等による加熱。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐ為、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
また、化学薬品と一緒に収納・保管をしないこと。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉

- 使用前・使用後に、破損、ヒビ、キズ、変色、腐食及び劣化等の異常、稼働部の動き等に異常がないか確認すること。
- 洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用する事。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ウォッシャーディスインフェクター等の器具洗浄器を使用する場合には、節水や時短メニューを使用すると、汚れや洗浄液が十分に落ち切らない事が考えられたため、必ずメーカーの取扱説明書を参照のうえ洗浄すること。
- 次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
①塩化ベンザルコニウム
②塩化ベンゼトニウム
③次亜塩素酸ナトリウム
④ポビドンヨード
⑤ホルマリン
⑥フェノール
⑦グルコン酸クロルヘキシジン
- 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）乾燥温度に注意すること。
- 錆びの原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名 称 : アドバンスジャパン株式会社
住 所 : 埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電話番号 : 048-234-8291

製造業者

Prime Choice Inc. (パキスタン)