

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000(JMDN コード)

Discover Eye(ディスカバーアイ)

【禁忌・禁止】

・レンズを通して太陽、光照射器、レーザー又はそれに準ずる光線及び点灯させたワイヤレスヘッドランプを直視しないこと[眼球に有害な影響を与える可能性があるため]

【形状、構造及び原理】

【形状、構造】

Black 2.5 倍セット、3.5 倍セット

Silver 2.5 倍セット、3.5 倍セット



倍率	作動距離	視野	焦点深度
2.5 倍	320～420 mm	100 mm	90 mm
3.5 倍	320～420 mm	60 mm	80 mm

【原理】

倍率の違うレンズを使用することにより、作業視野を拡大する。

【使用目的又は効果】

小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察野に光を供給する外部光源ワイヤレスヘッドランプを装着する。

【使用方法等】

1. ワイヤレスヘッドランプを Discover Eye に装

着する。

2. ヘッドストラップを装着する。
3. 本製品を装着し瞳孔間距離調節ネジを回転させ、瞳孔間距離を調節する。
4. ワイヤレスヘッドランプを点灯させ、拡大像を観察し、作業を行う。

【使用上の注意】

- 本製品は【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- 分解・改造は一切しないこと。
- 本製品に落下・転倒などの衝撃を与えないこと。
- 使用前に本製品に破損や異常が見られる場合は、使用しないこと。
- フレームが肌に触れる箇所で、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常が発生した時は、本製品の使用を止め、医師の診断を受けること。
- 浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- 故障の原因となるので、必ず付属の専用 A/C アダプターを使用し充電を行うこと。
- 水洗いでの超音波洗浄器使用は行わないこと。

【保管方法及び有効期間】

- 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
- 本製品は清掃した後ケースへ収納し、火気や水気がなく落下しない安全な場所に保管すること。
- 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- 本製品は、アルコールベースの洗浄剤、強アルカリ性の洗剤で洗浄しないこと。

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名 称:アドバンスジャパン株式会社

住 所:埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号:048-234-8291

製造業者

名 称:フォシャン ヴイメル デンタル イクイブ
メント カンパニーリミテッド

FOSHAN VIMEL DENTAL EUQIPMENT CO.,LTD

国 名:中華人民共和国