

2024年10月(第2版)  
\*2025年1月(第3版)

届出番号: 11B1X10025000901

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001 (JMDN コード)

## サイエンスリーブ

### 【禁忌・禁止】


- ・自分自身で脱着することができない患者。[何らかの症状が発生した場合にそれを悪化させる危険性が高いため]
- ・本製品に対するアレルギーを持つ患者。[アレルギー症状を引き起こす危険性が高いため]

### \* 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

衣類形状の医療機器であり、上半身用(上腕部被覆)・下半身用(大腿部被覆)の種類がある。


#### ① リカバリーロングスリーブ

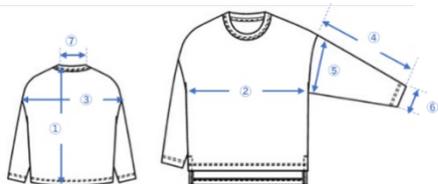

トップス (単位) cm

サイズ	XS	S	M	L	LL	3L
①後身丈	63.5	65.5	69.0	72.0	77.0	82.0
②身巾	51.5	54.5	58.0	60.0	64.0	68.0
③肩巾	60.0	63.0	67.0	69.5	73.5	77.5
④袖丈	42.0	42.5	44.5	47.0	50.0	53.0
⑤袖巾	22.0	23.0	24.0	25.0	26.5	28.0
⑥袖口巾	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0
⑦天巾	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0

#### ② リカバリーロングパンツ

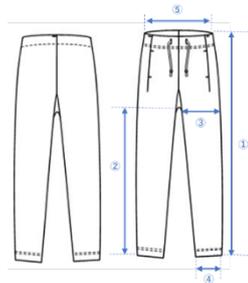


### ボトムス

(単位) cm

サイズ	XS	S	M	L	LL	3L
①パンツ丈	86.5	88.5	94.0	100.0	104.0	108.0
②股下(参考値)	61.5	62.0	66.0	71.0	73.5	76.0
③モモ巾(参考値)	29.5	30.5	32.0	34.5	36.5	38.5
④裾口巾	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0
⑤ウエスト	62.0	64.0	70.0	76.0	84.0	92.0

#### ③ リカバリーーフスリーブ

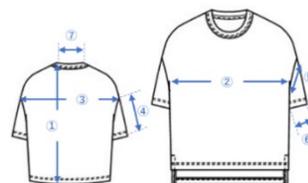


### トップス

(単位) cm

サイズ	XS	S	M	L	LL	3L
①後身丈	63.5	65.5	69.0	72.0	77.0	82.0
②身巾	51.5	54.5	58.0	60.0	64.0	68.0
③肩巾	60.0	63.0	67.0	69.5	73.5	77.5
④袖丈	16.5	16.5	17.0	17.5	18.5	19.5
⑤袖巾	22.0	23.0	24.0	25.0	26.5	28.0
⑥袖口巾	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0
⑦天巾	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0

#### ④ リカバリーーフパンツ

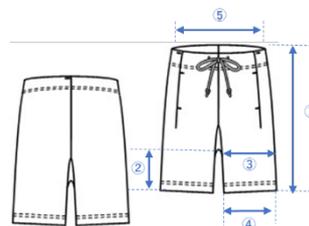

### ボトムス

(単位) cm

サイズ	XS	S	M	L	LL	3L
①パンツ丈	48.0	49.5	52.5	56.0	59.0	62.0
②股下(参考値)	22.0	22.5	24.0	26.0	28.0	30.0
③モモ巾(参考値)	29.5	30.5	32.0	34.5	36.5	38.5
④裾口巾	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0
⑤ウエスト	62.0	64.0	70.0	76.0	84.0	92.0

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

## 2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させる加工が施されており、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線領域の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

### 【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

- 疲労軽減
- 血行促進
- 筋肉のハリ、コリの軽減

### 【使用方法等】

本品は再使用可能である。

- 衣類として着用する。
- 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。

### 【使用上の注意】

- ① 着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ② 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないでください。
- ③ 家庭洗剤時の衣類乾燥機の使用はおさげいただき、形を整えて干してください。
- ④ 色物は色落ちすることがありますので他の白物との同時洗濯や、水に長時間のつけ置きはおさげ下さい。
- ⑤ 表面の毛羽は燃えやすいので、コンロやストーブなどの火元に近づく場合は、十分ご注意下さい。
- ⑥ 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行うこと。
- ⑦ 本製品の形状を変えたりするなど、加工、修理を行わないで下さい。

- ⑧ 本品に破損がないことを確認する。
- ⑨ 睡眠時の着用は、発汗作用が高まる事から、十分な水分補給を行うこと。

### 【保管方法及び有効期限等】

- ① 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- ② 耐用期間 2年

### 【取り扱い上の注意】

本品は繰り返し使用可能ですが、素材の湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

### 【包装】

1セット/1袋

### 【製造販売者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社  
住 所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1  
電 話 番 号：048-234-8291

製 造 業 者：チンタオシンジャーチェーンホームファッション  
コーポレーション  
QINGDAO XINJIACHENG HOMEFASHION CO.,LTD  
国 名：中国

販 売 業 者：株式会社 SEESAY  
\* 住 所：東京都渋谷区神宮前 4-30-3  
東急プラザ表参道オモカド 5F LOCUL501

### 【お問い合わせ】

電 話 番 号：03-4485-0009

Mail：info@seesay.jp

受付時間：10時～17時

土、日、祝日、年末年始、夏季など特別休暇除く

ご使用の前に必ずこの文章をお読みください。