

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

2 X U コンプレッションタイツ

【警告】

- ・重度の血行障害がある方は使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあるため]
- ・糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うっ血性心不全、有痛性青股腫、感染性静脈炎、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方・血圧の高い方・心臓などの血行に障害のある方・繊維に対して過敏症のある方、かぶれやすい体質の方は、着用前に医師にご相談ください。[症状が悪化するおそれがあるため]
- ・妊娠中もしくはその可能性のある方、授乳中の方は使用しないでください。[胎児及び乳児に悪影響があるおそれがあるため]

【禁忌・禁止】

- ・サイズが合わないものや2枚重ねでの着用はしないでください。[故障やケガの原因となる場合があるため]
- ・他の着圧ソックスやハイソックスとの重ね履きはしないでください。[故障やケガの原因となる場合があるため]
- ・就寝時には着用しないでください。[立位姿勢を元に設計されているため]
- ・本製品を加工・改造しないでください。[使用目的・効果に影響があるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

種々の加工法により成型された円柱状（又は筒様）をした形状である。装着部に編み上げられた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えると同時に、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造（設計）となっている。



2. 原材料

ナイロン・ポリウレタン

3. 原理

本品は、足首の圧迫力が最も高く、上にいくほど圧迫力が低くなる漸減的圧迫力になっており、静脈血を心臓方向へと還流しやすくすることにより、静脈血のうっ滞を軽減する。

【使用目的又は効果】

下肢の静動血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

- ①タイツを小さくまとめ手繰り寄せます。
- ②足首まで引き上げて足の甲、かかとの位置を合わせます。
- ③ふくらはぎにフィットさせながら、シワができないように均等に膝まで引き上げます。
- ④タイツを太ももの周囲にフィットさせながら、股下にすきまができないように引き上げます。
- ⑤ウエストまで引き上げ、全体にねじれ、たるみ、シワができないように着用します。
- ⑥引き上げるだけでは長すぎたり、ずり下がる原因になります。幅方向に均等に伸ばしながら着用してください。

【使用上の注意】

- ・ほつれ、破れなどの破損がある場合には着用しないでください。
- ・使用前に手足の爪でキズをつけないようなめらかに整えてください。
- ・弾性が強いのでゆっくりと引き上げてください。
- ・長時間着用する場合は、皮膚障害や血行障害につながるおそれがありますので、適宜着用し直してください。
- ・使用中に痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれ、かゆみなどの症状が発生した場合やその他身体に何らかの異常を感じたりした場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、清潔な場所で保管してください。
- ・長時間、水や汗に濡れたまま放置しないでください。
- ・タンブラー乾燥は避けてください。
- ・製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管はしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電話番号：048-234-8291

製造業者

パフォーマンスマニュファクチャリング（タイ）
ペリンダストリアンシュンホン（マレーシア）
シウレタ（スリランカ）