

機械器具 54 医療用捲綿子  
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000(JMDNコード)  
フロック鼻咽頭スワブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

本品は、ABS樹脂製の軸の先端部にナイロン製植毛の綿球がついた検体採取用の綿棒で、滅菌パウチで個別包装されています。

1. 外観



2. 寸法

- ・綿棒全長 : 153.0 mm ± 2.00 mm
- ・軸直径 : 2.50 mm ± 1.00 mm
- ・綿球長 : 23.00 mm ± 2.00 mm
- ・綿球直径 : 3.00 mm ± 1.00 mm

3. 原理

本品により鼻腔等の比較的狭い部位からの検体採取が可能となる。

【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取することを目的とした器具をいう。合成材料製の単細いロッドからなり、これに綿の物質のプレジエクトを取り付けて接触可能面に局所投与する器具。

【使用方法等】

- 1) 個別包装袋の開封口(「OPEN」と書かれた側)よりフィルムをはがし、綿球部分に触れないように、本品の軸部分をつまんで取り出します。
- 2) 本品の先端部分を検体部位に接触させ、検体を採取する。

【使用上の注意】

- ・本品は滅菌済みですので、個々の包装袋に破れや汚染の疑いがある場合は使用しないでください。また、開封後は、速やかに検体採取を行ってください。
- ・使用期限が切れたものは使用しないでください。
- ・本品に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れなどがあった場合は使用しないでください。

- ・検体採取時、軸部分(特に軸の細い部分)に力がかかり過ぎる、強く押す、過度のねじれ負荷がかかるような使い方はしないでください。また、軸を曲げる、反らす、折るなど、意図的な変形を加えないでください。
- ・挿入部位において、あきらかに通常より挿入距離が短い位置で軸に抵抗を感知する場合には、無理に挿入操作を続けしないでください。特に小児および鼻腔狭小者においては、擦過時に軸に掛かる抵抗が大きくなる可能性があるため、軸に力をかけて強く擦ったり、無理に回転させないでください。
- ・臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具(眼鏡、手袋、マスク等)を着用のうえ、充分注意して操作を行ってください。
- ・本品の使用後の廃棄にあたっては、滅菌処理を行い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件

2~30℃で、直射日光、多湿、凍結を避けて保管してください。

2. 有効期限

製造から2年間

外箱及び個別包装袋に、製造番号とともに記載されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:アドバンスジャパン株式会社

住所:埼玉県川口市大字東本郷118-1

電話番号:048-234-8291

製造業者:Taizhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd.

国名:中華人民共和国

【販売業者】

日本ジェネティクス株式会社

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F

TEL 03-3813-0961



取扱説明書を必ずご参照ください。