

衛 01 月経処理用タンポン
 一般医療機器 生理用タンポン JMDN コード 35694000
Kuu cup クーカップ

【警告】

- ・本製品の使用により、体質や体調によってトキシックショック症候群（Toxic Shock Syndrome:TSS）が発症する可能性があります。発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、血圧低下、粘膜充血などのような症状が発生した場合、本製品の使用を中止し、この添付文書を持って産婦人科などの専門医を受診してください。
- ・TSSの発症の可能性を軽減するために次のことを守ってください。
 本製品の1回の使用は12時間を超えないでください。
 12時間を超えるような就寝の場合には使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・過去にTSSを発症したことがある場合は、月経カップの使用前に医師に相談してください。
- ・分泌物（おりもの）に異臭がある人は、使用しないでください。
- ・膈内や膈口に痛みやかゆみがある場合や排尿時に不快感がある場合は、使用を中止し医師に相談してください。
- ・性交渉中には本製品を使用しないでください。本製品は避妊具ではありませんので、STD（性感染症）や妊娠を防止することはできません。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状・構造

本製品は、カップ部分とステム部分により構成されるシリコン製の月経カップ。サイズはSとLの2種類がある。



2. 原理

本品を膈口より挿入し、膈内内壁に密着し留まることで、月経若しくは他の膈分泌物を回収する。

【使用目的又は効果】

月経若しくは他の膈分泌物を回収するために膈口に挿入する合成素材でできたカップ状の詰め物

【使用方法等】

1) 使用前

- ①月経カップが変形しているときは、マグカップなどに水と本製品を入れ、電子レンジ（600w 5分）で加熱してください。1回で戻らないときは、冷ましてから加熱を数回繰り返してください。
- ②ステム部分（尻尾）を軽く引っ張って、簡単に切れないか確認してください。
- ③カップの上部に空気穴が空いているかを確認してください。

2) 消毒

- ①使用前は必ず煮沸消毒での除菌をしてください。
- ②糸（タコ糸・コットン糸など）を使用する場合は一緒に消毒してください。

3) 挿入

- ①月経カップをできるだけ細く折りたたんで膈内へ入れていきます。
- ②挿入後も前後左右にゆらしたり、指先でステムの周りを触って、へこんでいないかを確認します。その後、さらに奥まで挿入していきます。

4) 取り出し

- ①取り出すときは、便の排泄をするときのようにいきむとカップが少し下にさがってきます。
- ②下がってきたカップのステムや底の部分をつまみます。
- ③カップをつまむことができたなら、指の腹でカップの側面をへこませて、ゆっくりだしてください。

【使用上の注意】

本製品を装着中は、激しい運動、性行為をしないでください。

【保管方法及び有効期間等】

消毒後、直射日光・高温多湿の場所を避けて、保管してください。
 乾燥後は密閉容器などに保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
 名称：アドバンスジャパン株式会社
 住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1
 電話番号：048-234-8291

製造業者
 シンビトクジツギョウ（中国）