

2022年6月作成(第1版)

医 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 34864000(JMDNコード)

## 【TinyTAN AQUA BAND(絆創膏)】

### 再使用禁止

#### 【警告】

使用中又は使用后、本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談をしてください。

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1.形状

粘着部のシートの中央部に不織布製のパッドが取り付けられている。

寸法:65 mm×25 mm

#### 2.原理

本製品を傷口に貼付することで傷口患部等の被覆及び保護をすることができる。

### 【使用目的又は効果】

本製品は、身体の部位に用いる、粘着剤を付したポリウレタンフィルムの絆創膏材をいう。傷の被覆及び保護に用いる。

### 【使用方法等】

傷口とその周辺の汚れ、汗、水気などを拭取り清潔にした後パッドを患部にあて粘着部分で皮膚に固定してください。

### 【使用上の注意】

1. 本品の使用により発疹・発赤・湿疹かぶれ等にある場所には使用しないでください。
2. 傷口に粘着面を貼らないでください。
3. 皮膚の弱い人、お肌にあわない人は使用しないでください。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
5. 小児の手の届かないところに保管してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法:高温・多湿を避けて保管
2. 有効期間:有効期間は外箱に記載(西暦年月表示)[自己認証(製造元データによる)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者

名称:アドバンスジャパン株式会社

住所:埼玉県川口市大字東本郷118-1

電話番号:048-234-8291

#### 製造業者

名称:ヌリメディックス

NURIMEDICS Co.,Ltd.

国名:大韓民国