

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000
クラウンリムーバー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



写真は製品の一部を示す。

2. 原材料

ステンレス

3. 原理

先端部で口腔内の補綴物等を除去する。

【使用目的又は効果】

口腔内手術で口腔内の補綴物等の除去に用いる。

【使用方法等】

1. 本品は使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
2. 先端にて口腔内の（補綴物等）を除去する。
3. 使用後はできるだけはやく洗浄をすること。

【使用上の注意】

- ・使用前に、損傷、磨耗、又は機能していない部分がないかを必ず点検すること。
- ・使用中は接合部に過剰な負荷や負担をかけないこと。
誤った使用は把持部にずれや亀裂を生じさせる原因となる。
- ・使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ・すすぎが不十分であると、高压蒸気滅菌により変色することがあるので注意すること。
- ・長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるの

で、適時交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて保管すること。
- ・医師、従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・適切な洗浄、取扱及び滅菌、そして標準的な日常メンテナンスを怠った場合、器具の機能低下要因となる。
- ・溶液（例：生理食塩水、次亜塩素酸ナトリウム、ヨード含有消毒液など）にはステンレスに腐食や孔食を起こしやすいものがあるため長時間の接触を避ける、接触後は迅速に洗い流すこと。
- ・推奨滅菌方法及び条件は以下のとおりである。
滅菌方法：高压蒸気滅菌
滅菌条件：134℃、5 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：アドバンスジャパン株式会社

住 所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号：048-234-8291

製造元：プライムチョイス（国名パキスタン）
（Prime Choice Inc）