

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

グラマラスパッツ・メディカルケアシリーズ ソックスタイプ フルレッグ

【警告】

- ・重度の血行障害がある方は使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあります。]
- ・妊娠中または妊娠の可能性のある方は使用しないでください。[胎児に悪影響があるおそれがあります。]
- ・次の方は使用前に医師にご相談ください。
 - ①血行障害をおこしたことある方
 - ②血圧の高い方、心臓腎臓などに障害のある方
 - ③病気やケガなどによる脚のむくみやだるさを感じる方
 - ④かゆみや発疹をおこしている方
 - ⑤糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うっ血性心不全、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方[症状が悪化するおそれがあります。]
 - ⑥感染性（化膿性）静脈炎で治療を受けている方[敗血症や菌血症が悪化するおそれがあります。]

【禁忌・禁止】

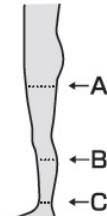
- ・重度の血行障害がある方は使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあります。]
- ・糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うっ血性心不全、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方は使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあります。]
- ・感染性（化膿性）静脈炎で治療を受けている方は使用しないでください。[敗血症や菌血症が悪化するおそれがあります。]
- ・サイズが合わないものや複数枚を重ねての使用はしないでください。[故障やケガの原因となる場合があります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、足首から太もも付け根までのフルレッグタイプのソックスで、種々の加工法により成型された円柱状（又は筒様）をした形状になっています。足首から太ももまでの装着部に編み上げられた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造（設計）となっています。

サイズは M-L と L-LL の 2 種類があります。

	サイズ(cm) 測定部位		M-L	L-LL
	身長		150-165	155-170
	A	太もも	44-53	48-59
	B	ふくらはぎ	32-40	36-44
	C	足首	20-24	22-26

2. 原材料

ナイロン・ポリウレタン

3. 原理

本品は、足首の圧迫力が最も高く、上にいくほど圧迫力が低くなる漸減的圧迫力になっており、静脈血を心臓方向へと還流しやすくすることにより、静脈血やリンパ液のうっ滞を軽減し、脚のむくみを緩和します。

【使用目的又は効果】

下肢の静動血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有し、脚のむくみを改善、血行の促進、リンパ液の流れを改善します。

【使用方法等】

- 1) 測定をした上で適切なサイズを選択してください。
- 2) 本品をつま先までたぐり寄せます。
- 3) 足首まで引き上げて位置を合わせます。
- 4) シワができないように均等に引き上げます。
- 5) 所定の長さまで引き上げたら、たるみ、しわ、よじれ等がないことを確認し、必要に応じ適宜修正する。

【使用上の注意】

- ・着用中にしわやたるみができないように生地を伸ばして着用してください。（特に足首、ひざ下、ひざ裏）
- ・使用中または使用中に、異常（気分が悪くなる、発疹、痛み、痺れなどの不快感）を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・締め付けがきついとを感じる場合は、適度な着脱を繰り返してください。
- ・本来の目的以外では使用しないでください。
- ・生地に爪を立てたり、無理に引っ張らないでください。（指輪などを外してください。）
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、水漏れに注意し、清潔な場所で保管してください。
- ・製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管はしないでください。

【保守・点検に係る事項】

- ・洗濯は、水または 40℃ 以下のぬるま湯に中性洗剤を溶かし手洗いしてください。
- ・塩素系漂白剤の使用、乾燥機・アイロン等による乾燥は、繊維を劣化させるおそれがあるので注意してください。
- ・直射日光を避け、陰干ししてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アドバンスジャパン株式会社
埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電話番号 048-234-8291

販売業者

株式会社 Y B - L A B.
東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-12-8 SSU ビル 3 階 *
連絡先 050-8881-9887

