

器 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000（JMDNコード）
【 コーヌス・リムーバー 】

【禁忌・禁止】

- ・器具の形態変更や改造等はいしないでください。
- ・破損・変形・劣化が認められた場合は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本製品は棒状の形状をしており、先端にはリングがある。



2. 原理

本製品の先端にあるリングをコーヌステレスコープ義歯（コーヌスクローネ）のノブにひっかけ、コーヌステレスコープ義歯を外す。

【使用目的又は効果】

本製品は、口腔内のコーヌステレスコープ義歯（コーヌスクローネ）の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

- 1) 使用に先立って洗浄・滅菌を行う。
- 2) 使用前に、外観に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないかを確認する。
- 3) 本製品を保持し、先端のリングをコーヌステレスコープ義歯（コーヌスクローネ）のノブにひっかけ、本製品をてこのように使用し、コーヌステレスコープ義歯を外す。

【使用上の注意】

- ・患者ごとに、洗浄・滅菌を行い、使用すること。
- ・発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・破折等による誤飲の恐れがあるので、本製品を曲げたり・切削・加圧を行わないこと、キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等の粗雑な扱いを行わないこと。
- ・薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるので速やかに拭き取ってください。
- ・製品の不具合を感じたときは使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温・多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
- ・金属電位差を要因としたガルバニック腐食を防ぐ為、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
- ・錆びている器具と一緒に保管しないこと
- ・化学薬品と一緒に保管しないこと

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄時の注意

- (1) 家庭用洗剤、超酸化水等の機能水は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- (2) グルタルアル製剤、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベントニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起す恐れがあり使用しないこと。
- (3) 薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。
- (4) 使用後は、防腐洗浄液、精製水を用いて本品に付着した血液、体液、組織片を速やかに洗浄すること。
- (5) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

2. 滅菌時の注意

- (1) 滅菌は、オートクレーブ滅菌器等の加熱滅菌器にて、温度 132℃以下、20 分以内で行うこと。
- (2) 金属を腐食させるので、化学性ガスを用いた滅菌器を使用しないこと。
- (3) 高温での乾燥は、機器が変形、変色することがあるので注意すること。
- (4) アルコールを使用した高圧滅菌、乾燥滅菌は、劣化の原因になるため使用しないこと。

3. 点検

- (1) 使用後は、直ちに破損等がなかったかを点検すること。
- (2) 長期使用により、劣化が生じるので適時交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号：048-234-8291