

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000
クリスチャン・スキニー プレミアム

【警告】

- ・重度の血行障害がある方は使用しないでください。糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うっ血性心不全、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方は着用前に医師にご相談ください。[症状が悪化するおそれがあります。]
- ・妊娠中もしくはその可能性のある方、授乳中の方は使用しないでください。[胎児及び乳児に悪影響があるおそれがあります。]

【禁忌・禁止】

- ・サイズが合わないものや2枚重ねでの着用はしないでください。[故障やケガの原因となる場合があります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

オーブントウのストッキングタイプで、種々の加工法により成型された円柱状（又は筒様）をした形状である。装着部に編み上げられた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造（設計）となっている。



2. 原材料

ナイロン・ポリウレタン

3. 原理

本品は、足首の圧迫力が最も高く、上にいくほど圧迫力が低くなる漸減的圧迫力になっており、静脈血を心臓方向へと還流しやすくすることにより、静脈血のうっ滞を軽減する。

【使用目的又は効果】

下肢の静動血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

- ①ソックスをたぐり寄せます。
- ②足首まで引き上げて足の甲、かかとの位置を合わせます。
- ③シワができないように均等に引き上げます。
- ④リブ編みで囲まれた丸い部分を膝に合わせます。
- ⑤シワができないように引き上げ、履き口を調整します。

【使用上の注意】

- ・使用前に手足の爪でキズをつけないようなめらかに整えてください。
- ・弾性が強いのでゆっくりと引き上げてください。
- ・使用中にかゆみを強く感じたり、その他身体に何らかの異常を感じたりした場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、水漏れに注意し、清潔な場所で保管してください。
- ・製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管はしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電話番号：048-234-8291

製造業者

名称：ファッションファンシーニットイング
Fashion Fancy KNITTING CO., LTD
国名：台湾