

機械器具 12 理学診療用器具  
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000  
メディカル着圧ソックス

**【警告】**

- ・重度の血行障害がある方は使用しないでください。糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うっ血性心不全、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方は着用前に医師にご相談ください。[症状が悪化するおそれがあります。]
- ・妊娠中もしくはその可能性のある方、授乳中の方は使用しないでください。[胎児及び乳児に悪影響があるおそれがあります。]

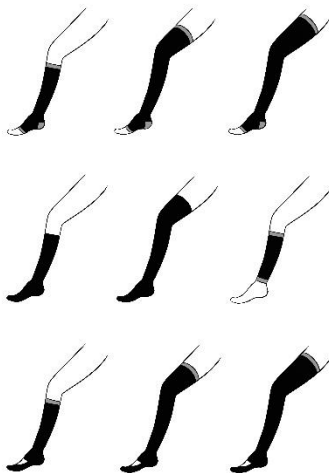
**【禁忌・禁止】**

- ・サイズが合わないものや2枚重ねでの着用はしないでください。[故障やケガの原因となる場合があります。]

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状・構造

オープントゥタイプ、ソックスタイプ、窓付きソックスタイプ、ふくらはぎタイプがあり、タイプに応じて膝下、膝上、太ももまでの長さがあります。種々の加工法により成型された円柱状（又は筒様）をした形状である。装着部に編み上げられた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えると同時に、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造（設計）となっている。

**サイズ**

|    | ふくらはぎ周囲   | 足首周囲    |
|----|-----------|---------|
| SS | ～約 30cm   | ～約 19cm |
| S  | 28cm～35cm | 17～22cm |
| M  | 32cm～39cm | 19～24cm |
| L  | 36cm～43cm | 21～26cm |
| LL | 40cm～49cm | 24～29cm |
| 3L | 約 46cm～   | 約 26cm～ |

## 2. 原理

本品は、足首の圧迫力が最も高く、上にいくほど圧迫力が低くなる漸減的圧迫力になっており、静脈血を心臓方向へと還流しやすくすることにより、静脈血のうっ滞を軽減する。

**【使用目的又は効果】**

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

**【使用方法等】**

- ①ソックスをたぐり寄せて、ゆっくりとつま先から装着してください。
- ②かかとの位置を合わせながら足首まで引き上げます。
- ③ゆっくりとふくらはぎの上まで引き上げます。
- ④膝上、太もも丈のものは、ひざ下の位置で左右前後を整えてからひざ上まで引き上げます。

**【使用上の注意】**

- ・使用前に手足の爪でキズをつけないようぬめらかに整えてください。
- ・弾性が強いのでゆっくりと引き上げてください。
- ・気分が悪くなったり、痛みやしびれなどの不快感、かゆみ、発疹等異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・長時間着用される場合は適度な着脱を繰り返してください。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で保管してください。
- ・製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管はしないでください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

## 製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社  
住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1  
電話番号：048-234-8291

## 製造業者

名称：ファッションファンシーニットینگ  
Fashion Fancy KNITTING CO., LTD  
国名：台湾

名称：ダユエンタープライズ  
Da Yu Enterprise Co., Ltd  
国名：台湾