

メディカルアームスリーブ

【警告】

＜適用対象＞

- (1) 深部静脈血栓症の患者。[本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれがあるため。]
- (2) 動脈血行障害、急性心不全、未処置のうっ血性心不全、装着部位に未処置の炎症性疾患、化膿性疾患、癌もしくは開放創のある患者。[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。]
- (3) 装着部位に神経障害のある患者。[血行障害を起こしても認識できない危険性がある。]
- (4) 糖尿病患者。[無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、また症状を悪化させるおそれがあるため。]
- (5) 繊維に対して過敏症のある患者。[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

- (1) 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
- (2) 感染性静脈炎の患者。[菌血症や敗血症を発生、増悪させるおそれがあるため。]
- (3) 装着部位に極度の変形を有する患者。[適正な圧迫圧が得られないため。]

【形状、構造及び原理等】

1. 構成品

タイプ：①ハンドカバータイプ（手の甲まで）

②リストタイプ（手首まで）


圧迫圧：手首：12 ～ 35hpa、二の腕：8 ～ 20hpa

＊参考値であり、製品の構造や装着状態により変動することがあります。

サイズ構成：S/M/L/LL

組成：綿：85%、ポリウレタン：15%

2. 形状

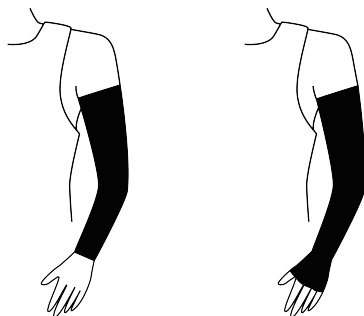

3. 原理

弾性素材が装着部に同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造になっている。

【使用目的又は効果】

上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の腕用弾性スリーブである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

1. 装着前（サイズ選定）

- 1) 手首及び上腕の周囲長（cm）を測定してください。
- 2) 寸法表から正しいサイズを選んでください。

サイズ (cm)	S	M	L	LL
上腕	18.0 ～ 24.0	22.0 ～ 32.0	28.0 ～ 38.0	35.0 ～ 45.0
手首	13.0 ～ 16.0	13.5 ～ 18.5	16.0 ～ 22.0	18.0 ～ 25.0

＊サイズが2サイズにまたがる場合は大きいサイズを選んでください。

2. 装着方法

- 1) スリーブの中に手を入れ、手首部の位置にあわせて、しわやねじれがないこと、生地が二重になっていないことを確認してください。
- 2) 生地をゆっくりと上腕部の方向へ引き上げていきます。
- 3) 規定の長さまで引き上げてください。肘などにしわがないことを確認してください。

3. 脱ぎ方

- 1) 爪や指輪で生地を傷つけないよう注意してください。
- 2) 上腕側から生地をゆっくりと折り返し、少しずつ手首方向へ丸めるように下ろしてください。
- 3) 無理に引っ張らず、しわを伸ばしながら徐々に外してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意（以下の患者には慎重に適用して下さい）

- 1) 術後等患者の意識レベルが低い場合及び患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用してください。
- 2) ギプス、外傷等により、装着部位が長時間不動状態にある患者は、潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため、注意して使用してください。
- 3) 本製品の使用により、手に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前には感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。

2. 重要な基本的注意

- 1) 正しい圧迫力を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本製品を選択する。またサイズ適応外の場合には使用しないこと。
- 2) 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように装着すること。本製品が、装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなおすこと。
- 3) 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合は、適切なサイズに変更すること。
- 4) 本製品に、破損（ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着すること。破損がある場合は適切な圧迫圧が得られないため使用しないこと。
- 5) 本製品は、繊維製品のため、次のような場合には破損することがあるので注意すること。
 - ①強く引っ張り上げたり、爪を立てて装着しないでください。
 - ②爪が伸びていたり、反っていたりする腕には装着しないでください。
 - ③肌荒れした手や鋭利なものへの接触は避けてください。
- 6) 本製品をはさみで切るなど加工、修理を行わないこと。
- 7) 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので付着しないように注意すること。

3. 不具合・有害事象

本製品の使用により、以下の有害事象が起こる可能性があります。

1) 重大な有害事象

①血行障害

チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

②知覚障害

神経麻痺等の知覚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

③皮膚障害

・本製品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

・ショック等末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し、壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。

2) その他の有害事象

本製品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれなどの皮膚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本製品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もあるので、同様に適切な処置を行ってください。

【保管方法及び有効期限等】

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 繰り返し使用する場合は破損（伝線、ほつれ、破れ等）や繊維の劣化等がないことを確認してから使用してください。
2. 中性洗剤で手洗いし、乾燥機・漂白剤・柔軟剤・アイロン・ドライクリーニングは使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号：048-234-8291

製造業者

名称：ファッションファンシーニットイング

Fashion Fancy KNITTING CO., LTD

国名：台湾

販売元及びお問い合わせ先

名称： 加藤貿易株式会社

住所：東京都中央区新川 1-3-21

電話番号： 0120-804-020