

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 歯科用咬合スプリント 36311000

## トレーニングマウスピース PREMIUM SMILE

### 【禁忌・禁止】

- ・発疹・皮膚炎等の過敏症状の起こる可能性がある場合には使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあります]
- ・鼻腔に疾患がある方は使用をしないでください。[症状が悪化するおそれがあります]
- ・本製品を歯列矯正の目的で使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあります]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

本製品は、歯牙の咬合面を被覆するマウスピースの形状をしています。ソフトタイプとハードタイプに分かれ、サイズはS・M・L・TNサイズの4種類がある。 \* \*



#### 2. 原材料

シリコーン

#### 3. 原理

本製品を、日中または就寝時に、口腔内に装着することで、転位歯・動揺歯の位置の保持、クレンチング（噛みしめ癖）や歯ぎしりの治療、その後遺症の治療、筋肉又は顎関節の疼痛の除痛をすることができる。

### 【使用目的又は効果】

本製品は、歯牙の咬合面を被覆する柔軟性のある器材です。転位歯又は動揺歯の位置の保持、クレンチング（噛みしめ癖）や歯ぎしりとその後遺症の治療、及び筋肉又は顎関節の疼痛の除痛に使用する。使用期間は 30 日を超えないようにしてください。

### 【使用方法等】

- 1) 対象年齢に応じて適切なサイズを選択してください。  
Sサイズ：3歳半～6歳  
Mサイズ：5～8歳  
Lサイズ：6～12歳  
TNサイズ：8歳～15歳  
軽めの歯ぎしりが気になる・噛む力が特に強い方はハードタイプを使用し、それ以外の方はソフトタイプを使用してください。
- 2) 本製品のタンタグを上に向けて持ってください。
- 3) 口内に挿入し、歯牙上に装着し、ゆっくりと口を閉じてください。
- 4) 舌をタンタグに触れるようにして、マウスピースの中心部分に歯の中心がくるように合わせてください。
- 5) 使用目安は、日中は1～2時間、夜間は就寝時間となります。

### 【使用上の注意】

- ・本製品を歯列矯正の目的で使用しないでください。
- ・本製品に傷、変形等の異常がある場合には使用しないでください。
- ・強く噛むと破損する恐れがありますので強く噛まないで下さい。
- ・本製品を飲み込んだりしないように注意して使用してください。
- ・本製品を累積して30日以上使用しないようにしてください。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、清潔な場所で保管してください。
- ・製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管はしないでください。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は流水で十分に洗浄をし、水分をふき取ってマウスピースケースで保管をしてください。

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アドバンスジャパン株式会社  
埼玉県川口市大字東本郷 118-1  
電話番号 048-234-8291

製造業

Shenzhen Kis Technology Limited (中国)  
シェンチェン キス テクノロジー