

【ダイカット救急絆】

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

粘着部のシート中央部に不織布製のパッドが取り付けられている。

サイズは複数あり、縦横寸法は以下の範囲内となる。

寸法：縦 20 mm～70 mm

横 20 mm～70 mm

原理

本製品を傷口に貼付することで創傷面の保護をすることができる。

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

被覆してある両側のセパレータをはぎ、中央のパッドに触れないようにしてパッドが傷口を保護するように貼り付けてください。

【使用上の注意】

1. 使用に際しては、次のことに注意してください。

- ① 使用は 1 回限りにしてください。
- ② パッド部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- ③ 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ④ 粘着面を患部に貼らないでください。
- ⑤ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ⑥ 使用後はがすときは、患部やまわりの皮膚をいためないように、ゆっくりとはがして

ください。

2. 使用中又は使用後は、次のことに注意してください。

本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ① 小児の手のとどかない所に保管してください。
- ② 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ③ 滅菌済ですので、個包装を破損しないようにご注意ください。
- ④ テープに色ムラが起こる場合もありますが品質に問題はありません。

有効期間

有効期限は箱に記載（西暦年月表示）「自己認証（製造元データによる）」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市東本郷 118-1

電話番号：048-234-8291

製造業者

名称：アールエフエックス ケア マニュファクチャリング カンパニー リミテッド

RFX+CARE Manufacturing Co.,Ltd.

国名：中国