

医 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 34864000（JMDN コード）

【TinyTAN ばんそうこう】

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

粘着部のシートの中央部に不織布製のパット
が取り付けられている。

寸法 72 mm×19 mm

2. 原理

本製品を傷口に貼付することで傷口患部等の
被覆及び保護をすることができる。

【使用目的又は効果】

本製品は、身体の部位に用いる、粘着剤を付し
たポリ塩化ビニル製の絆創膏材をいう。傷の被覆
及び保護に用いる。

【使用方法等】

傷口とその周辺の汚れ、汗、水気などを拭取り清
潔にした後パットを患部にあて粘着部分で皮膚に
固定してください。

【使用上の注意】

- ・本品の使用により発疹・発赤・湿疹かぶれ等
ある場所には使用しないでください。
- ・傷口に粘着面を貼らないでください。
- ・皮膚の弱い人、お肌にあわない人は使用しない
でください。
- ・小児に使用させる場合には、保護者の指導監督
のもとに使用させてください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光を避け、なるべく涼しいところに保管
してください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ
等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法：高温・多湿を避けて保管
2. 有効期間：有効期限は外箱に記載（西暦年月表
示）「自己認証（製造元データによる）」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名 称：アドバンスジャパン株式会社

住 所：埼玉県川口市東本郷1 1 8－1

電 話 番 号：048-234-8291

製造業者

名称：シェンツェン キーン シリコーン プロダクト

Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd

国名：中国