

器 12 理学診療用器具  
一般医療機器 温熱用パック 37240010（JMDNコード）

【 トルマリンホットパック 】

【警告】

次のような人には使用しないこと。

- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害者
- ・温度感知喪失者
- ・酒気を帯びた人

【禁忌・禁止】

- ・電子レンジでの加熱は絶対にしないこと。
- ・治療に必要な時間を超えないように注意すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

消炎鎮痛処置（温熱治療）を行うための加熱媒体（トルマリン鉱石）、加熱媒体を内包する中袋、中袋を覆う専用カバーで構成される。



2. 原理

本製品を、専用ウォーマー（別売）で所定の温度まで加熱する。トルマリンの高い保温性により本製品の温度が維持され、本製品を患部に当て消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う。

【使用目的又は効果】

加熱媒体であるトルマリン鉱石の入ったパックで、専用の加熱装置で加熱し、患部に当て消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本製品を加熱する専用ウォーマーを設置する。
2. 本製品を使用する4～5時間前に、本製品を専用ウォーマーに入れ加熱する。
3. 加熱された本製品をウォーマーから取り出し、破損等がないかを確認する。
4. 本製品を患部に当て、温度が維持されている間、患部を消炎鎮痛処置（温熱治療）する。
5. 使用が終了したら、本製品が冷めたのを確認して、保管場所にて保管する。

【使用上の注意】

- ・専用カバー又は中袋に破損等が見られた場合は使用を中止し、新しいものと取り換えること。
- ・患者に異常が見られた場合、又は治療患部に低温火傷の症状や痒みが出た場合は、直ちに治療をやめ適切な処置をとること。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥した場所に保管し、できるだけ水濡れしないようにすること。

【保守・点検に係る事項】

専用カバーは水洗いが可能だが、必ず加熱媒体を内包する中袋を取り外すこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

名称：アドバンスジャパン株式会社  
住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1  
電話番号：048-234-8291



名称：株式会社タオ  
住所：大阪府大阪市東淀川区下新庄 5-2-18  
電話番号：06-6160-6080

取扱説明書を必ずご参照ください