

機械器具 35 医療用はさみ
一般医療機器 はさみ 35325001 (JMDNコード)

【 手術用はさみ 】

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、遠位端を開閉するための近位端（ハンドル部）と組織、布、縫合糸等を切断する2枚の刃（ブレード部）により構成される。



2. 原理

本製品のハンドル部を握って先端を閉じることにより、ブレード部がかみ合い、組織、布、縫合糸等を切断することが可能となる。

【使用目的又は効果】

通常、手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる器具をいう。回転軸のある2枚の刃（通常、ハンドルに親指と他の指用の穴がある）からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作する。

【使用方法等】

- 1) 本製品は再使用可能な機器であり、未滅菌品です。本製品を使用する前に必ず滅菌して下さい。オートクレーブ滅菌（134℃、5分）を推奨。
- 2) 一般的な外科手術の手技に従って、適切な組み合わせのもとに操作をして下さい。
- 3) ハンドル部を手のひら又は親指と人差し指等を用いて握るとブレード部が閉じられ、組織、布、縫合糸等の切断することができます。
- 4) 使用後は適切な方法により洗浄を行い保管して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は、使用する前に滅菌する必要があります。本製品を購入後初めて使用する場合も、洗浄及び滅菌を実施して下さい。
- 2) 本製品を使用する前に、傷や変形、損傷がないことを必ず確認して下さい。
- 3) 本製品使用後は速やかに洗浄等を行って下さい
- 4) 腐食を避けるために、生理食塩液に長時間接触させないで下さい。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染された本製品を取り扱う際には、防水加工された手袋を着用する。
- ・オートクレーブ、洗浄剤、消毒剤は、説明書などに従い正しく使用すること。
- ・廃棄する場合は、付着した血液、体液、組織などの汚物を除去、洗浄した後に処分する。
- ・ブレード部の滅菌、消毒は以下の方法によること。
 - ①使用後直ちに洗浄液などに浸す。
 - ②スポンジ、布あるいはソフトブラシなどを使って洗い、きれいな水で洗浄剤が残留しないようにすすぐ。
 - ③水分を拭き取るか乾燥させてから、オートクレーブ滅菌（134℃、5分）をする。
- ・ハンドル部の滅菌、消毒は以下の方法によること。
 - ①消毒剤を塗布した布で拭く。
 - ②液体に浸さない。
 - ③内部に液体が入らないようにする。
 - ④オートクレーブ滅菌（134℃、5分）が可能。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷118-1
電話番号：048-234-8291

製造業者：プライムチョイス Prime Choice Inc
国名：パキスタン