



機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001（JMDNコード）

【 手術用鉗子 】

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、遠位端を開閉するための近位端（ハンドル部）と臓器・組織・血管を把持・結合・圧迫・支持する部分（プラットホーム部）により構成される。

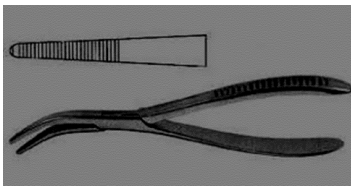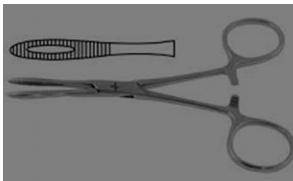

2. 原理

本製品のハンドル部を握って先端を閉じることに
より、プラットホーム部がかみ合い、臓器・組織・
血管を把持・結合・圧迫・支持することが可能と
なる。

【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧
迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本
品は再使用可能である。

【使用方法等】

- 1) 本製品は再使用可能な機器であり、未滅菌品です。
本製品を使用する前に必ず滅菌して下さい。オー
トクレーブ滅菌（134℃、5 分）を推奨。
- 2) 一般的な外科手術の手技に従って、適切な組み合わ
せのもとに操作をして下さい。
- 3) ハンドルを手のひら又は親指と人差し指等を用い
て握るとプラットホーム部は閉じ、臓器、組織、血
管を把持、結合、圧迫又は支持することができます。
- 4) 使用後は適切な方法により洗浄を行い保管して下
さい。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は、使用する前に滅菌する必要があります。
本製品を購入後初めて使用する場合も、洗浄及び滅
菌を実施して下さい。
- 2) 本製品を使用する前に、傷や変形、損傷がないこと
を必ず確認して下さい。
- 3) 本製品使用後は速やかに洗浄等を行って下さい
- 4) 腐食を避けるために、生理食塩液に長時間接触させ
ないで 下さい。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 汚染された本製品を取り扱う際には、防水加工され
た手袋を着用する。
- ・ オートクレーブ、洗浄剤、消毒剤は、説明書などに
従い正しく使用すること。
- ・ 廃棄する場合は、付着した血液、体液、組織などの
汚物を除去、洗浄した後に処分する。
- ・ ブレード部、プラットホーム部の滅菌、消毒は以下
の方法によること。
 - ①使用後直ちに洗浄液などに浸す。
 - ②スポンジ、布あるいはソフトブラシなどを使って
洗い、きれいな水で洗浄剤が残留しないようにす
すぐ。
 - ③水分を拭き取るか乾燥させてから、オートクレー
ブ滅菌（134℃、5 分）をする。
- ・ ハンドル部の滅菌、消毒は以下の方法によること。
 - ①消毒剤を塗布した布で拭く。
 - ②液体に浸さない。
 - ③内部に液体が入らないようにする。
 - ④オートクレーブ滅菌（134℃、5 分）が可能。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷 1 1 8 - 1
電話番号：048-234-8291

製造業者：プライムチョイス Prime Choice Inc
国名：パキスタン