

機械器具 50 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009（JMDNコード）

## 【 喉頭鏡 】

## 【形状、構造及び原理等】

## 1. 形状・構造

ブレード（医療機器）、ハンドル（非医療機器）から構成される。ブレードには、マッキントッシュ型、ミラー型などの形状やサイズ、材質の異なる数種がある。



## 2. 原理

本製品を挿入することにより喉頭展開させる。

## 【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具をいう。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。ハンドル、ブレードから成る。

## 【使用方法等】

- 1) 患者の体型や症状に適したブレードを選択する。
- 2) 使用前に電球が緩んでいないことを確認すること。
- 3) ブレードの接続部をハンドルのランナーに掛ける。
- 4) ブレードをカチッと音がするまで、上方に回旋させ、点灯させる。
- 5) ブレードを下方に回旋させ、消灯させる。
- 6) 使用後は、ブレードをハンドルから離脱する。

## 【使用上の注意】

- ・患者の歯をてこの支点として操作しないこと。
- ・有資格者以外は使用しないこと。
- ・長時間使用しないこと。
- ・当社製品のブレードとハンドルの組合せのみで使用し、別製品と併用しないこと。

- ・手術・治療などの医療行為以外には使用しないこと。
- ・塩素系、ヨウ素系、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤及びホルマリンなどは、製品を腐食させる可能性があるので使用しない。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・清潔な場所に保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・長時間使用しない場合は、ハンドルから電池を取り外しておくこと。

## 【保守・点検に係る事項】

- ・汚染された本製品を取り扱う際には、防水加工された手袋を着用する。
- ・オートクレーブ、洗浄剤、消毒剤は、説明書などに従い正しく使用すること。
- ・廃棄する場合は、付着した血液、体液、組織などの汚物を除去、洗浄した後に処分する。
- ・ブレードの滅菌、消毒は以下の方法によること。
  - ①使用後直ちに洗浄液などに浸す。
  - ②スポンジ、布あるいはソフトブラシなどを使って洗い、きれいな水で洗浄剤が残留しないようにすすぐ。
  - ③水分を拭き取るか乾燥させてから、オートクレーブ滅菌（134℃、5分）をする。
- ・ハンドルの滅菌、消毒は以下の方法によること。
  - ①消毒剤を塗布した布で拭く。
  - ②液体に浸さない。
  - ③内部に液体が入らないようにする。
  - ④オートクレーブ滅菌（134℃、5分）が可能。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社  
住所：埼玉県川口市大字東本郷118-1  
電話番号：048-234-8291

製造業者：プライムチョイス Prime Choice Inc  
国名：パキスタン