

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN コード：70976000）
PVC グローブ

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- ・本製品を複数の患者に対して再利用しないこと[汚染・感染のおそれがあるため]
- ・本製品を再利用しないこと[製品が破損や性能が変化すること]
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本製品は左右一対からなる合成ゴムを使用した検査・検診用手袋であり、術者が手に装着して使用するものである。

サイズ	S	M	L
品番	HCMU001-S	HCMU002-M	HCMU003-L
重量(g)	4.0	4.5	5.0
全長(mm)	240±10	240±10	240±10
甲の幅(mm)	85±3	95±3	105±3
中指長さ(mm)	71±2	80±2	88±2
厚さ(mm)	0.08±0.02		
パウダー	なし（フリー）		

【使用目的又は効果】

本製品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製の手袋である。

【使用方法等】

取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】**＜使用注意＞**

- ・記載した目的にのみ使用すること。
- ・同じ手袋を複数の患者に使用しないこと。

＜重要な注意事項＞

- ・製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎の症状がでる恐れがあり、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・製品本体の特性上、鋭利なものに接触すると損傷する恐れがあるため、使用前に損傷がないことを十分に確認し使用すること。

＜相互作用＞

- ・特殊な薬品の使用により、本製品が膨潤・浸透するおそれがあるため、状態を十分に確認の上、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】**[保管方法]**

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。

[有効期間]

- ・製造より 3 年間[自己認証による]
- ・使用期限は本品の包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**製造販売業者**

アドバンスジャパン株式会社

埼玉県川口市大字東本郷 1 1 8 - 1

電話番号：048-234-8291

製造業者

ジーボヘンチャンプラスチックラバープロダクツ

Zibo Hengchang Plastic & Rubber Products Co., Ltd.

国名：中国