

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード 34654000

カルノン


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。[ディスポーザブル製品のため。]
2. 再滅菌禁止。[再滅菌を意図していないため。]
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。[品質が担保できないため。]
4. 記載の使用目的以外に使用しないこと。
5. アルギン酸パッドなど本製品の成分に対してアレルギーのある患者には使用禁止。

【形状、構造及び原理】

- 本品は、アルギン酸カルシウムの繊維のみを不織布状にしたものである。
- 白色からベージュ色のシート状である。
- 本品は、滅菌済みであり単回使用である。

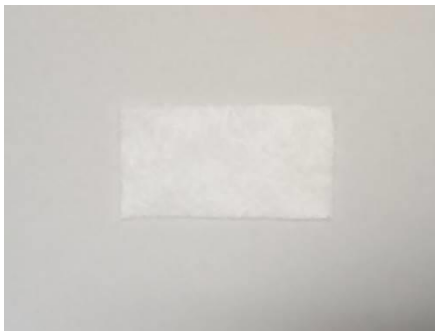

- サイズ: 50mm×100mm 型番:NRDC001
100mm×100mm NRDC002
カスタムサイズ

【使用目的又は効果】

本品は、術後創傷の被覆・保護に用いる。

【使用方法等】

創傷面を清浄し、本品を押し当てる。必要があればテープ等で固定する。

【使用上の注意】

＜基本的注意＞

1. 使用者は、使用前に本品の外観を確認し、汚れ、損傷等の異常がないことを確認すること。
2. 傷に化膿や熱、腫れのある場合は使用しないこと。

＜その他の注意＞

1. 使用後は、感染性廃棄物として処理すること。

【保管方法及び有効期間】

＜貯蔵・保管方法＞

1. 品質保持のため、高温、低温、多湿や直射日光の当たる場所を避け常温で清潔な場所に保管すること。
2. 損傷の原因となりうる保管方法は避けること。

＜使用期限＞

ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者・製造業者＞

日本毛織株式会社 研究開発センター
兵庫県加古川市米田町船頭440

＜お問合せ＞

電話 079-431-2105 FAX 079-431-2070

＜発売元＞

株式会社ニッケ・メディカル