

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000
アグパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。[ディスポーザブル製品のため。]
2. 再滅菌禁止。[再滅菌を意図していないため。]
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。[品質が担保できないため。]
4. 記載の使用目的以外に使用しないこと。
5. アルギン酸パッドなど本製品の成分に対してアレルギーのある患者には使用禁止。

【形状、構造及び原理】

- 本品は、アルギン酸カルシウムの繊維のみを不織布状にしたものである。
- 白色からベージュ色の細長いテープ状である。
- 本品は、滅菌済みであり単回使用である。



サイズ: 10mm×100mm 型番:NDA001
カスタムサイズ

【使用目的又は効果】

本品は、創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

【使用方法等】

創傷又は外科切開部に本品を押し当てる。

【使用上の注意】

＜基本的注意＞

1. 使用者は、使用前に本品の外観を確認し、汚れ、損傷等の異常がないことを確認すること。
2. 傷に化膿や熱、腫れのある場合は使用しないこと。

＜その他の注意＞

1. 使用後は、感染性廃棄物として処理すること。

【保管方法及び使用期間】

＜貯蔵・保管方法＞

1. 品質保持のため、高温、低温、多湿、直射日光の当たる場所を避け常温で清潔な場所に保管すること。
2. 損傷の原因となりうる保管方法は避けること。

＜使用期限＞

ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者・製造業者＞

日本毛織株式会社 研究開発センター
兵庫県加古川市米田町船頭440

＜お問合せ＞

電話 079-431-2105 FAX 079-431-2070

＜発売元＞

株式会社ニッケ・メディカル