

歯科材料 9 歯科用研削材料

**一般医療機器 歯面研磨材 70904000（歯科用研磨器材 70907000）

ネオ・ポリッシングクリーム （仕上げ研磨材）

NEO POLISHING CREAM - FINE GRIT -

【形状・構造及び原理等】**

**本品は、スクレーリング及び支台歯形成後の表面研磨、ブラケット装着前の歯面研磨、ルートプレーニング後の根面研磨、補綴物表面等の仕上げ研磨に適した微粒子研磨成分を配合した、ペーストタイプの仕上げ研磨材である。

**1. 形状

ペースト

**2. 組成

グリセリン

ケイソウ土

ポリビニルピロリドン

酸化亜鉛

その他

**3. 原理

粘結成分（ポリビニルピロリドン）がタバコのヤニ等の着色汚れを吸着するとともに、研磨成分（ケイソウ土）を研磨面に停留させ、物理的に研磨する。

【使用目的、効能又は効果】**

**歯面の清掃及び研磨、補綴物等の研磨

【品目仕様等】**

**1. 外観・性状

淡紅色の粘稠なペーストで、わずかに芳香があり、味はやや甘く、清涼感がある。

**2. 平均粒子径（メジアン径）： $8 \pm 2 \mu\text{m}$

【操作方法又は使用方法等】**

**本品の適量を歯科用予防治療用ブラシ（ポリッシングブラシ）、研磨カップ（ラバーカップ）等に塗布して研磨するか、応用部位に直接貼付して歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等で研磨する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

**1) 歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等に適した使用回転数範囲に注意して使用すること。

**2) 必要に応じて本品の前に粒子の粗い研磨材（スクレーングクリーム・アドネスト等）を使用すること。

〔研磨がより効果的に行える。〕

【使用上の注意】*

1. 使用注意

1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

*2) 本品を【使用目的、効能又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

*1) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

2) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

3) 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】*

〔貯蔵・保管方法〕

*1. 室温で保管すること。

2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

*外箱に表示

〔記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。〕

【包装】*

1. 10 g

2. 50 g

【主要文献及び文献請求先】*

〔主要文献〕

1. 大久保信男，間 滋夫，松井恭平，成田むつ，石川達也（東歯大，保存）：各種研磨材の珐瑯質面における研磨面あらさに関する実験的研究，
歯科学報，80(7)，935～943，1980。

2. 石川達也（東歯大，保存）：仕上げ研磨用ネオ・ポリッシングクリームについて，
ネオ製薬工業（株）社内資料（1975）。

*〔文献請求先〕

請 求 先：ネオ製薬工業株式会社 学術情報部

住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

ホームページ：<http://www.neo-dental.com/>

フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者及び製造業者：ネオ製薬工業株式会社

住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電話番号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613



ネオ製薬工業株式会社