

歯科材料 9 歯科用研削材料

**一般医療機器 歯面研磨材 70904000（歯科用研磨器材 70907000）

スケーリングクリーム・アドネスト[®] （荒研磨材）

SCALING CREAM ADONEST[®] - COARSE GRIT -

【形状・構造及び原理等】**

**本品は、スケーリング及び支台歯形成後の荒研磨、ルートブレーニング後の根面の荒研磨、補綴物表面等の荒研磨に適した研磨成分を配合した、ペーストタイプの荒研磨材である。

**1. 形状

ペースト

**2. 組成

グリセリン

ケイソウ土

ポリビニルピロリドン

酸化亜鉛

その他

**3. 原理

粘結成分（ポリビニルピロリドン）がタバコのヤニ等の着色汚れを吸着するとともに、研磨成分（ケイソウ土）を研磨面に停留させ、物理的に研磨する。

【使用目的、効能又は効果】**

**歯面の清掃及び研磨、補綴物等の研磨

【品目仕様等】**

**1. 外観・性状

淡青色～灰青色の粘稠なペーストで、わずかに芳香があり、味はやや甘く、清涼感がある。

**2. 平均粒子径（メジアン径）：30 ± 10 μm

【操作方法又は使用方法等】**

**本品の適量を歯科用予防治療用ブラシ（ポリッシングブラシ）、研磨カップ（ラバーカップ）等に塗布して研磨するか、応用部位に直接貼付して歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等で研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

**1) 歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等に適した使用回転数範囲に注意して使用すること。

**2) 必要に応じて本品の後に粒子の細かい研磨材（ネオ・ポリッシングクリーム等）を使用すること。

〔研磨面が滑沢になり、より効果的である。〕

【使用上の注意】*

1. 使用注意

1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

* 2) 本品を【使用目的、効能又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

* 1) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

2) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

3) 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】*

〔貯蔵・保管方法〕

* 1. 室温で保管すること。

2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

* 外箱に表示

〔記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。〕

【包装】*

1. 10 g

2. 50 g

【主要文献及び文献請求先】*

*〔主要文献〕

石川達也、栗山純雄（東歯大，保存）：粗研磨用スケーリングクリーム・アドネストについて，
ネオ製薬工業（株） 社内資料（1975）.

*〔文献請求先〕

請 求 先：ネオ製薬工業株式会社 学術情報部
住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3
ホームページ：<http://www.neo-dental.com/>
フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者及び製造業者：ネオ製薬工業株式会社

住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電話 番号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613



ネオ製薬工業株式会社