

歯科材料9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯面研磨材 70904000

# アドネスト<sup>®</sup> コース

\*\*（粗研磨材）

ADONEST<sup>®</sup> COARSE

## 【形状・構造及び原理等】

\*\* 本品は、スケーリング後の粗研磨、ルートプレーニング後の根面の粗研磨等に適した研磨成分を配合した、ノンフッ素タイプの粗研磨材である。

### \* 1. 構成

ペースト（内容量 50g）

外観・性状：淡青色～灰青色の粘稠なペーストで、わずかに芳香があり、味はやや甘く、清涼感がある。

組成：グリセリン、ケイソウ土、カルメロースナトリウム、酸化チタン、その他

### 2. 原理

研磨成分（ケイソウ土）が歯面の汚れを物理的に研磨する。

### \* 3. 理工学的性質（試験方法は社内規格による）

項目	規格	実測値
粒度(メジアン径)	37±10 μm	37.3 μm
pH	6～10	7.6
使用性質(付着性)	塗布部位に付着する。	適合

## 【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨

## 【使用方法等】

\*\* 本品の適量を歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等に塗布して研磨するか、応用部位に直接貼付して歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等で研磨する。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- \*\* (1) 歯科予防治療用ブラシ、歯磨カップ等に適した使用回転数範囲に注意して使用すること。
- (2) 必要に応じて本品の後に粒子の細かい研磨材（アドネスト ファイン等）を使用すること。〔研磨面が滑沢になり、より効果的である。〕

## 【使用上の注意】

### \* 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (3) 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

## 【保管方法及び有効期間等】

### \* [保管方法]

室温で保管すること。

### [使用期限]

外箱に表示

[記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電話番号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613

フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768

製造元：ネオ製薬工業株式会社

