

機械器具 66 歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

ネオ ミキシングチップ（S）
ネオ ミキシングチップ（SSS）

NEO MIXING TIPS

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、専用カートリッジに取り付けるためのアダプターを有する練和・吐出用チップである。

1. 構造

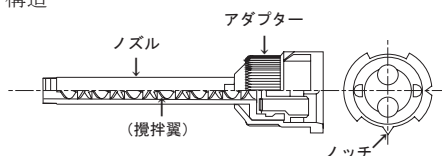

サイズ	アダプターの色	本数(本)	全長(mm)
S	ピンク	8	82～83
SSS	ライトブルー	10	57～59

組成：プラスチック

2. 原理

専用カートリッジより押し出された2種類のペーストが、押し出し圧により攪拌翼を通過することで練和が行われ、ノズル先端より吐出する。

【使用目的又は効果】

専用カートリッジに充填されたペースト状歯科材料の練和並びに吐出に用いる。

【使用方法等】

通法により、以下の操作を行う。

1. ディスペンサー（別売）に専用カートリッジを取り付ける。
2. カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、2種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
3. 本品（ミキシングチップ）のアダプター部分のノッチとカートリッジの切り欠きを合わせてセットし、時計回りに90°回転させ、確実に固定する。
4. ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。
5. 本品を取り外す場合には、反時計回りに90°回転させ本品のノッチとカートリッジの切り欠きを合わせて引き抜く。

適合確認済み当社製品

サイズ	製品名
S	エヴァタッチ スーパー
SSS	ネオフィット

【使用方法に関連する使用上の注意】

練和物を急激に吐出するとペーストの漏れ、カートリッジの破損を引き起こすことがあるので、吐出には注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意

本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、殺菌灯（紫外線ランプ）を点灯したキャビネット等に保管しないこと。[本品が劣化するため。]
2. 使用後、本品を取り外すか、装着したまま保管するかは、使用する製品（カートリッジ）の指示に従うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を滅菌及び消毒する際には、本品及び使用する歯科材料に影響を及ぼさないことを確認すること。
なお、オートクレーブ滅菌を行うと形状が変化するので、注意すること。
2. 本品に破損（割れ、ひび等）及び変形等の異常がないことを確認してから使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社

住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電 話 番 号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613

フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768

製 造 元：ネオ製薬工業株式会社



ネオ製薬工業株式会社

A9A