

機械器具01 手術台及び治療台

一般医療機器 手術台アクセサリ(JMDN: 70469000)

ジェル パッド

【警告】

本品は、絶対にいねいに取り扱ってください。〔外装が破損した場合は修理ができません。〕

【禁忌・禁止】

- 1) 本品は、絶対に滅菌しないこと。〔高温により変質します。〕
- 2) 本品は、絶対にアルコール（アルコールが配合された洗剤を含む）や、強力な洗剤（原液）で清拭しないこと。〔外装がアルコールにより変質します。〕
- 3) 本品は、手術台の角やその他の医療機器などで、傷つけないこと。
- 4) 大型のサイズのものを運搬する際には、ゆるく巻き上げた状態で行うこと。また、折り曲げた状態で保管しないこと。〔パッドが破損する原因になります。〕


【形状・構造及び原理等】

1. 材質:

ポリウレタン、ポリエーテルウレタン(外装材)

2. 形状又は構造


1) 長方形

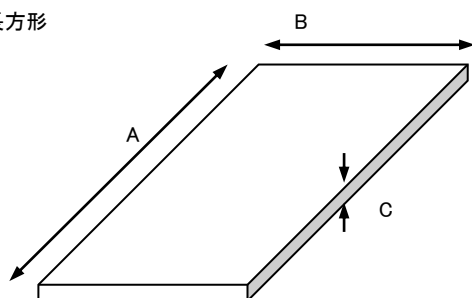

寸法: 単位mm

カタログNo.	A:	B:	C:
TE-0238	380	100	13
TE-0239	610	115	13
TE-308	610	165	13
TE-100	1170	510	13
TE-101	1830	510	13
TE-110	460	305	13
TE-104-A	510	230	13
TE-403	430	280	13
TE-404	560	510	13
TE-502	150	83	45
TE-5303	480	430	13
TE-602	250	150	40
TE-605	355	150	40
TE-615	460	150	40
TE-LXP	915	305	13
TE-LGP	760	305	13
TE-PSP	180	100	13


2) 切り欠き付

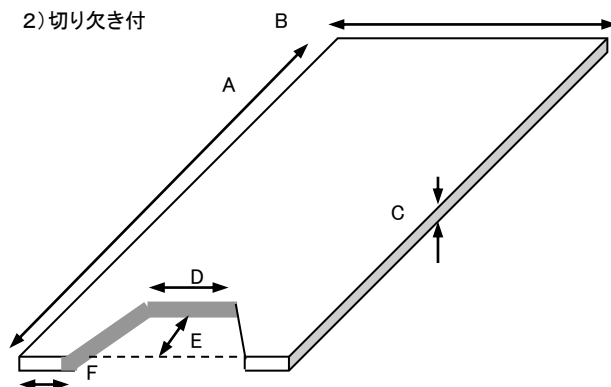

寸法: 単位mm

カタログNo.	A:	B:	C:	D:	E:	F:
TE-103	1170	510	13	140	120	110
TE-104-B	990	510	13	140	120	110
TE-104-C	510	510	13	140	120	110


3) 正方形

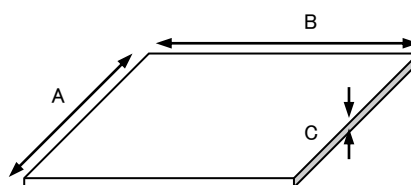

寸法: 単位mm

カタログNo.	A:	B:	C:
TE-105	510	510	13


4) 半円柱型

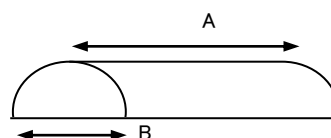

寸法: 単位mm

カタログNo.	A: 長さ	B: 幅
TE-616	305	100
TE-617	410	100
TE-618	510	100
TE-619	305	150
TE-620	410	150
TE-621	510	150

5) ドーナツ型

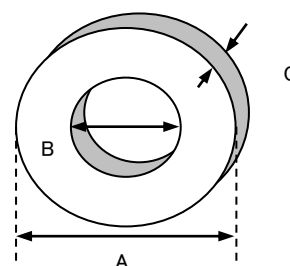

別冊の取扱説明書もご参照ください

寸法：単位mm

カタログNo.	A:	B:	C:
TE-201	200	80	50
TE-202	130	60	30
TE-203D	80	40	20

3. 原理

本品は手術台の上や、手術台アクセサリの上に敷いて用いる柔軟なパッドである。

【使用目的又は効果】

本品は、術中の患者への圧迫を緩和させるために用いる。

【使用方法等】

- (1) 本品は滅菌できないので、ご注意下さい。
- (2) 本品は、社名ロゴが印字されている面を上にして敷いて下さい。原則として、本品の上に患者を直接寝かせて下さい。覆布を掛けて使用する場合は、本品をきつく包まないで下さい。糊付けされた布、しわや折り目がついた布は使用しないで下さい。
- (3) 本品を手術台の角やその他の医療機器などで傷つけないように注意して下さい。大型のサイズのことを運搬する際は、社名ロゴが印字されている面が内側になるように巻き上げて、両手で抱きかかえて下さい。
- (4) 手術が長時間にわたる場合は、患者の体温が奪われることを最小限にするために、予め温めた本品の上に患者を寝かせて下さい。パッドを温めるには、毛布温め用のキャビネットに入れる、温水を用いるなどの方法があります。一般的に、本品を温める際には、本品の温度が人体の体温(37℃)を超えないようにして下さい。
- (5) 低体温法の手術に用いる場合は、本品を冷蔵庫に入れて冷却しておくことも可能です。なお、本品を温めたり、もしくは冷却して用いる場合は、本品が患者の皮膚に直接触れないように、覆布を掛けてご使用下さい。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品は、絶対に滅菌しないでください。
- (2) 本品は、絶対にアルコール(アルコールが配合された洗剤を含む)や、強力な洗剤(原液)で清拭しないでください。
- (3) 本品は、手術台の角やその他の医療機器などで、傷つけないように注意してください。
- (4) 本品を運搬する際には、ゆるく巻き上げた状態で行うこと。また、折り曲げた状態で保管しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

乾燥した場所で、直射日光を避けて保管してください。

保管の際には、パッドを広げた状態とするか、巻き上げた状態に保ってください。折り曲げた状態で保管しないでください。パッドの表面に保管庫の扉やその他のとがった物が触れないように注意してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) ジェル パッドを清掃、除染する際には、常に病院規格の機器洗浄

液を使用し、除染はアルコールを含まないもので行ってください。手術台のマットを清掃する洗剤が好適です。

- (2) パッドは、約40℃の温水で丸洗いすることができます。パッドを洗濯機や乾燥機に入れないでください。

- (3) 清掃と除染の際には、アルコールや、その他の強力な消毒液(原液)は使用しないでください。これらの液体はシミになったり、パッドの表面を硬化させてしまう原因となります。洗剤が残らないように、清潔な水で完全にゆすいでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社 根本商会