

再使用禁止

ステリー バンパー(滅菌済)

【禁忌・禁止】

再使用禁止です。[本品は再滅菌できません。]

【形状・構造及び原理等】


1. 材質:

ポリエーテルウレタン

2. 形状又は構造

カタログNo.: 508

ステリー バンパー
(滅菌済)

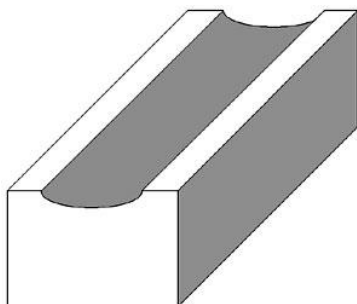

3. 原理

直方体のクッションである。

【使用目的又は効果】

本品は、手術台の上に乗せて使用し、術中に患者の身体を支えるクッションである。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 本品は、一回限りの使用のみで再使用できません。
- 2) 包装に損傷がないことを確認します。

2. 使用方法

- 1) 本品は滅菌されています。包装を無菌的に開封し、本品を取り出します。
- 2) 本品を使用する際は平らな面を下にして手術台の上に置き、上面の溝に患者の四肢を乗せて安定させます。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品は滅菌済で使い捨てです。再使用しないでください。
- 2) 本品は使用目的以外に使用しないでください。
- 3) 本品使用中、患者の身体に無理な力がかかっているか、必ず確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

滅菌包装に記載の使用期限までに使用すること。

水濡れに注意し、紫外線や直射日光を避けて常温常湿保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 根本商会