

IMPクランプ シリーズ

【禁忌・禁止】

1. 指定品以外の医療機器と組み合わせて使用しないで下さい。
[規格が適合しないおそれがあります。]
2. 本器を勝手に改造しないで下さい。[本器が機能しなくなるおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 材質:

デメーヨー型 プッシュボタン クランプ	アルミニウム合金、ステンレス鋼
デメーヨー型 プッシュボタン クランプ (ミニ)	アルミニウム合金、ステンレス鋼

2. 形状又は構造

1) デメーヨー型 プッシュボタン クランプ(カタログNo.:713-302)



2) デメーヨー型 プッシュボタン クランプ(ミニ)(カタログNo.:713-409)



3. 原理

上下のアゴで手術台のサイドレールを挟み、固定用ノブを締めることにより金具とレールを固定する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術用器具を手術台のサイドレールに固定するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

1) デメーヨー型 プッシュボタン クランプの使用法

- (1) 本品は、IMP社の手術台アクセサリのうち、2本のロックピンを有する器具と組み合わせます。
- (2) 本品は未滅菌であるため使用する前に必ず洗浄し、以下に例示する条件以上、又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌して下さい。
滅菌方法: 高圧蒸気滅菌
滅菌条件: ①(重力置換式滅菌装置の場合)
温度 121℃、時間 20 分以上
②(真空排気式滅菌装置の場合)
温度 132℃、時間 4 分以上
- (3) 固定用ノブを、反時計回りに止まるまで廻します。プッシュボタン クランプのアゴの中に、押しネジが突出していないことを確認します。

- (4) プッシュボタン クランプを、滅菌済みドレープの上から手術台のサイドレールにはめ合わせます。この時、手術台アクセサリの2本のロックピンが、クランプの上アゴの両端に開いている孔に入るように位置をそろえて下さい。位置を決定したら、クランプの上下のアゴを止まるまで閉じて手術台のサイドレールを挟んで下さい。
- (5) プッシュボタン クランプの固定用ノブを時計回りに止まるまで廻し、押しネジをレールに確実に押し当てて固定します。
- (6) 手術台アクセサリの2本のロックピンを、プッシュボタン クランプの上アゴの両端に開いている孔に落とし込みます。
- (7) 手術台アクセサリが可倒式ロックピンを備えている場合は、ロックピンの回転台座にある左右の固定用ネジを確実に締めます。
- (8) プッシュボタン クランプを取り外す場合は、固定用ノブをゆるめて、手術台アクセサリの2本のロックピンを上方に抜き去ります。
- (9) プッシュボタン クランプの下アゴの左右にあるプッシュボタンを押して、クランプのアゴを開放し、手術台のサイドレールから取り外します。

2) デメーヨー型 プッシュボタン クランプ(ミニ)の使用法

- (1) 本品は、手術台アクセサリのうち、手術台取付金具が板状、もしくは丸棒のものに適合します。
- (2) 本品を滅菌済みドレープの上から設置する必要がある場合、未滅菌であるため使用する前に必ず洗浄します。以下に例示する条件以上、又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌して下さい。
滅菌方法: 高圧蒸気滅菌
滅菌条件: ①(重力置換式滅菌装置の場合)
温度 121℃、時間 20 分以上
②(真空排気式滅菌装置の場合)
温度 132℃、時間 4 分以上
- (3) 固定用ノブを、反時計回りに止まるまで廻します。プッシュボタン クランプ(ミニ)のアゴの中に、押しネジが突出していないことを確認します。
- (4) プッシュボタン クランプ(ミニ)を、手術台のサイドレールにはめ合わせます。この時、手術台アクセサリの取付金具が、クランプの上アゴのΩ字型の孔に入るように位置をそろえて下さい。位置を決定したら、クランプの上下のアゴを止まるまで閉じて手術台のサイドレールを挟んで下さい。
- (5) 手術台アクセサリの取付金具を、プッシュボタン クランプ(ミニ)のΩ字型の孔に上から落とし込みます。この時、取付金具が手術台のサイドレールの手前側に落ちていることを確認して下さい。クランプの固定ノブを締めてサイドレールと取付金具を確実に押さえて固定します。
- (6) プッシュボタン クランプ(ミニ)を取り外す場合は、固定用ノブをゆるめて、手術台アクセサリの取付金具を上方に抜き去ります。
- (7) プッシュボタン クランプの下アゴの左右にあるプッシュボタンを押して、クランプのアゴを開放し、手術台のサイドレールから取り外します。

※併用する個々の手術台アクセサリの添付文書及び取扱説明書を熟読すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 指定品以外の医療機器と組み合わせて使用しないで下さい。
- 2) 本器を勝手に改造しないで下さい。
- 3) 本器と取付金具のはめ合わせがきつい場合は、無理に組み合わせ

ないで下さい。

- 4) 本品を落としたりぶつけたりすると変形、故障の原因となるので注意して下さい。

<相互作用>

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状	機序・危険因子
他社製の手術台アクセサリー	器具を正しく組み合わせできないことにより、術中に器具の保持が不安定になる可能性がある	設計・開発方針が異なるため、適合しない

【保管方法及び有効期限等】

<保管方法>

常温常湿保管

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前に、クランプの固定用ノブが確実に締まることを確認して下さい。
- 2) クランプのアゴを上下から挟むと、アゴが段階的に閉じること、一度閉じたアゴは容易に開かないこと、プッシュボタンを押すとアゴが開放されることを点検して下さい。
- 3) 異常がみられる場合は、絶対に使用しないで下さい。
- 4) 本品を清掃する場合は、必ず中性洗剤を使用して下さい。アルカリ性／酸性の洗剤は避けて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社 根本商会