

**再使用禁止**

**ニー ポジショナー用パッドG(滅菌済)**

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止です。[本品は再滅菌できません。]
2. デメーヨー型 ニー ポジショナー(医療機器製造販売届出番号 13B1X00248IMP002)以外と併用しないで下さい。[他社製品には適合しません。]

**【形状・構造及び原理等】**


**1. 材質:**

ブーツ用パッド	ポリウレタン及びゲルポリマー
プロテクター パッド	ポリエーテルウレタン及びポリスチレン
バンデージ	合成繊維及び粘着剤


**2. 形状又は構造**

本品は、以下の構成を組み合わせて製造販売される。また、補充のために単品供給されることがある。

1) ブーツ用パッド

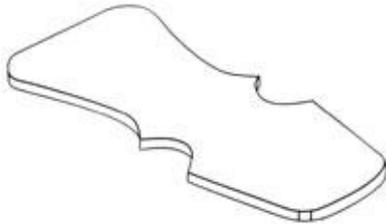

2) プロテクター パッド

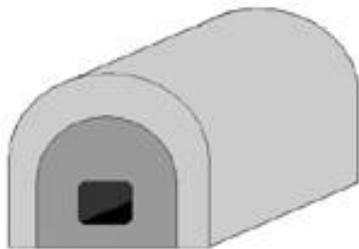

3) バンデージ



カタログNo. 803-GP-10: ブーツ用 ディスポ パッド(滅菌済)

- ・ブーツ用パッド
- ・バンデージ

カタログNo. 907-GP-10: プロテクター パッド 3点セット(滅菌済)

- ・プロテクター パッド
- ・ブーツ用パッド
- ・バンデージ

**3. 原理**

膝関節手術用の架台に患者の足を固定するためのパッド一式である。

**【使用目的又は効果】**

本品は、デメーヨー型 ニー ポジショナーに用いるパッドである。

**【使用方法等】**

**1. 全般的な注意**

本品は、一回限りの使用のみで再使用できません。

**2. 使用前の準備**

包装に損傷がないことを確認します。

**3. 使用方法**

**1) ブーツ用 ディスポ パッド(滅菌済)の使用方法**

(1) ブーツ用パッド及びバンデージは滅菌されています。包装を無菌的に開封し、本品を取り出します。

(2) パッドをデメーヨー型 ニー ポジショナーのブーツの中にセットします。

(3) 患者の足をブーツに入れ、バンデージで足を巻きます。始めに中足骨周辺に5周程巻きつけてからブーツ上方へ巻き、患者の足首を巻くようにします。なお、外側及び内側のくるぶしは露出させておきます。(右図を参照して下さい。)



(4) くるぶしを露出させておくことにより、必要に応じてアライメント・デバイスを設置することができ、拍動を容易に確認することができます。

(5) 改良型ブーツに使用する場合は、ブーツのスリットに汎用のストラップを通しておきます。パッドをブーツの中にセットしてから患者の足を入れ、ストラップにて固定します。

**2) プロテクター パッド 3点セット(滅菌済)の使用方法**

(1) プロテクター パッド、ブーツ用パッド及びバンデージは滅菌されています。包装を無菌的に開封し、本品を取り出します。

(2) プロテクター パッドをデメーヨー型 ユニバーサル ディストラクターにセットするには、デメーヨー型 ユニバーサル ディストラクターのリリースレバーを押した状態でサポート バーを押し、ディストラクターを最も縮めた状態にします。プロテクター パッドの四角穴を、サポート バーにはめ込みます。

(3) ブーツ用 ディスポ パッド(滅菌済)の使用方に従い、ブーツ用パッド及びバンデージを使用します。



※併用するデメーヨー型 ニー ポジショナー (医療機器製造販売届出番号:13B1X00248IMP002) の添付文書及び取扱説明書を熟読すること。

別冊の取扱説明書もご参照ください

**【使用上の注意】**

**＜重要な基本的注意＞**

ブーツ用パッド、プロテクター パッド及びバンテージは使い捨てです。  
再使用しないで下さい。

**＜相互作用＞**

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状	機序・危険因子
他社製のパッド、ブーツ等	患者の下肢保持がずれる可能性がある	設計・開発方針が異なるため、適合しない

**【保管方法及び有効期間等】**

**＜保管方法＞**

直射日光と紫外線を避けて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： 株式会社 根本商会