

再使用禁止

ニー ポジショナー用パッドG(滅菌済)

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止です。〔本品は再滅菌できません。〕
- ※2. デメーヨー型 ニー ポジショナー(医療機器製造販売届出番号 13B1X00248IMP002)またはデメーヨー型 ニー ポジショナーD2(医療機器製造販売届出番号 13B1X00248IMP014)以外と併用しないで下さい。〔他社製品には適合しません。〕

【形状・構造及び原理等】


1. 材質:

ブーツ用パッド	ポリウレタン及びゲルポリマー
プロテクター パッド	ポリエーテルウレタン及びポリスチレン
バンデージ	合成繊維及び粘着剤


2. 形状又は構造

本品は、以下の構成を組み合わせて製造販売される。また、補充のために単品供給されることがある。

1) ブーツ用パッド

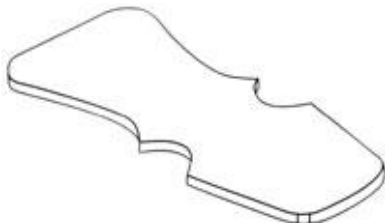

2) プロテクター パッド

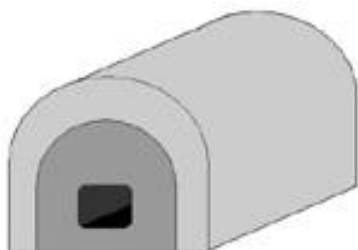

3) バンデージ



カタログNo. 803-GP-10: ブーツ用 ディスポ パッド(滅菌済)

- ・ブーツ用パッド
- ・バンデージ

カタログNo. 907-GP-10: プロテクター パッド 3点セット(滅菌済)

- ・プロテクター パッド
- ・ブーツ用パッド
- ・バンデージ

3. 原理

膝関節手術用の架台に患者の足を固定するためのパッド式である。

【使用目的又は効果】

本品は、デメーヨー型 ニー ポジショナーに用いるパッドである。

【使用方法等】

1. 全般的な注意

本品は、一回限りの使用のみで再使用できません。

2. 使用前の準備

包装に損傷がないことを確認します。

※3. 使用方法

1) ブーツ用 ディスポ パッド(滅菌済)の使用方法

- (1) ブーツ用パッド及びバンデージは滅菌されています。包装を無菌的に開封し、本品を取り出します。
- (2) パッドをデメーヨー型 ニー ポジショナーのブーツの中にセットします。
- (3) 患者の足をブーツに入れ、バンデージで足を巻きます。始めに中足骨周辺に5周程巻きつけてからバンデージをカットします。残りのバンデージで患者の下腿を巻くようにします。なお、外側及び内側のくるぶしは露出させておきます。(右図を参照して下さい。)
- (4) くるぶしを露出させておくことにより、必要に応じてアライメント・デバイスを設置することができ、拍動を容易に確認することができます。
- (5) 改良型ブーツに使用する場合は、ブーツのスリットに汎用のストラップを通しておきます。パッドをブーツの中にセットしてから患者の足部を入れ、ストラップにて固定します。



2) プロテクター パッド 3点セット(滅菌済)の使用方法

- (1) プロテクター パッド、ブーツ用パッド及びバンデージは滅菌されています。包装を無菌的に開封し、本品を取り出します。
- (2) プロテクター パッドをデメーヨー型 ユニバーサル ディストラクターにセットするには、デメーヨー型 ユニバーサル ディストラクターのリリースレバーを押した状態でサポートバーを押し、ディストラクターを最も縮めた状態にします。プロテクター パッドの四角穴を、サポートバーにはめ込みます。
- (3) ブーツ用 ディスポ パッド(滅菌済)の使用方法に従い、ブーツ用パッド及びバンデージを使用します。このとき、バンデージのブーツのブラケット(階段状金具)を覆わないでください。



※併用するデメーヨー型 ニー ポジショナー (医療機器製造販売届出番号: 13B1X00248IMP002) またはデメーヨー型 ニー ポジショナーD2 (医療機器製造販売届出番号: 13B1X00248IMP014) の添付文書及び取扱説明書を熟読すること。

別冊の取扱説明書もご参照ください

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

ブーツ用パッド、プロテクター パッド及びバンデージは使い捨てです。
再使用しないで下さい。

＜相互作用＞

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状	機序・危険因子
他社製のパッド、ブーツ等	患者の下肢保持がずれる可能性がある	設計・開発方針が異なるため、適合しない

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

直射日光と紫外線を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社 根本商会