

機械器具01 手術台及び治療台

一般医療機器 手術台アクセサリ(JMDN: 70469000)

再使用禁止

ニー トライアングル用パッド(滅菌済)

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.ニー トライアングル(医療機器製造販売届出番号: 13B1X00248IMP003)以外と併用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、ニー トライアングル(医療機器製造販売届出番号: 13B1X00248IMP003)に用いるパッドである。本品は滅菌品であり、患者ごとの使い捨てとなっている。

2. 材質:

ポリエーテルウレタン

3. 形状又は構造

- カタログNo.: 193-P

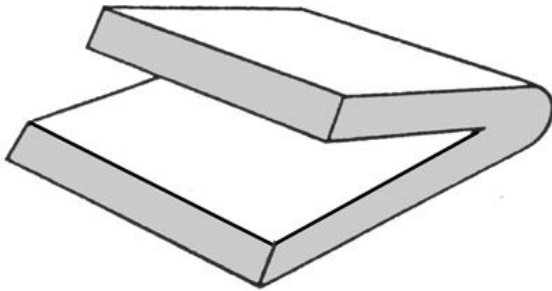

4. 原理

膝関節手術用の架台に装着して、患者の膝の裏を保護する。

【使用目的又は効果】

本品は、ニー トライアングルに用いるパッドである。

【使用方法】

1. 全般的な注意

本品は、一回限りの使用のみで再使用できません。

2. 使用前の準備

包装に損傷がないことを確認します。

3. 使用方法

- (1) 本品は滅菌されています。包装を無菌的に開封し、本品を取り出します。
- (2) ニー トライアングルの角に本品を装着して、患者の膝の裏を保護します。
- (3) 患者の膝を乗せ、ニー トライアングルの最適な設置向きを決定します。トライアングルの高さを変更する場合は、本品の装着をやり直してください。

※ニー トライアングル(医療機器製造販売届出番号: 13B1X00248IMP003)の添付文書及び取扱説明書を熟読すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品は使い捨てです。再使用しないでください。

2. 相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状	機序・危険因子
他社製の膝関節手術用架台	装着できない可能性がある	設計・開発方針が異なるため、適合しない

【保管方法及び有効期間等】

直射日光と紫外線を避けて常温常湿で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 根本商会