

アクティブ電極側アダプタ

(フットスイッチアクティブ電極側アダプタ)

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

本品は、様々なフットスイッチ式アクセサリのコード及び滅菌済シングルユースコード等に対応したアダプタである。本品は、弊社のジェネレータのフットスイッチ式アクセサリ接続端子又は他社製のジェネレータに使用できる。

製品番号	名称
E0502-1	フットスイッチアクティブ電極側アダプタ

2. 原理

本品をジェネレータのフットスイッチアクセサリの接続端子に挿入し、本品のアクセサリ接続口にフットスイッチ式アクセサリのコネクタを挿入することで、ジェネレータとアクセサリを接続する。

*【使用目的又は効果】

本品は、フットスイッチ式アクセサリと電気手術器本体との接続に用いるアダプタである。


*【使用方法等】

1. 手術前


- (1) ジェネレータの電源が切れていることを確認する。
- (2) 本品をジェネレータのフットスイッチ式アクセサリの接続端子に挿入する。



- (3) アダプタキャップのパネ仕掛けのタブを押して、アクセサリ接続口を開く。

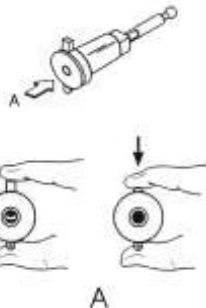

- (4) アクセサリコードの真鍮製の端子をアクセサリ接続端子に接続する。パネ仕掛けのタブが戻された時に、真鍮製の端子が本品内部に固定される。接続されていない場合には、本品で真鍮製の端子が弧形になる場合や、機能しない場合がある。

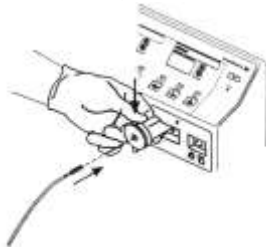

注意：タブの穴にナイロンコードを通して、本品をジェネレータに固定することが可能である。

2. 手術後

- (1) アクセサリコード及び本品をジェネレータから取り外す前に、ジェネレータの電源が切れていることを確認する。
- (2) アダプタキャップ上のパネ仕掛けのタブを押して、アクセサリ接続口を開く。



- (3) アクセサリコードを本品から取り外す。
- (4) ジェネレータの接続端子から本品を取り外す。

<組み合わせて使用する医療機器>

下記は、本品に接続できるように設計された弊社のアクセサリの一部である。

製品番号	名称
E0510*1	フットスイッチ式モノポーラパロ機器用コード
E2250HF*2	フット ペンシル コーティングブレード・ホルスター
E2520H*3	アルゴンプラスハンドセット

※1 販売名：モノポーラ鉗子用コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL013A

※2 販売名：電気メス用電極（滅菌）
医療機器承認番号：20900BZG00030000

※3 販売名：アルゴンガス手術装置用アクセサリ
医療機器承認番号：21400BZY00486000

【使用上の注意】

1. *重要な基本的注意

- (1) 本品及びコードが正しく接続されており、金属部分が露出していないことを確認すること〔患者及び手術スタッフが感電する可能性があるため〕。
- (2) ジェネレータの出力中に本品を接続しないこと〔患者及び手術スタッフへの損傷や感電の可能性があるため〕。
- (3) 併用するジェネレータの出力設定にあたっては、本品の最大ピーク電圧 4,000 ボルトを超えない高周波電圧とすること。
- (4) 本品は未滅菌品のため、必要に応じて使用前に洗浄すること。洗浄方法については、本書の【保守・点検に係る事項】を参照すること。

2. 不具合・有害事象

本品は使用に際し、以下のような不具合・有害事象が考えられる。

- (1) 重大な不具合
 - 1) 機器の破損及び動作不良
 - 2) 発火
 - 3) 放電
- (2) 重大な有害事象
 - 1) 熱傷
 - 2) 感電

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

(1) *洗浄方法

- 1) 肉眼で見える汚れ(血液、粘液、組織)をすべて取り除く。
- 2) アダプタの表面全体を、洗剤を湿らせた柔らかい布で清拭する。
- 3) 完全に乾かす。

注意：アダプタは液体に浸さないこと〔破損のおそれがあるため〕。

2. 業者による保守点検事項

業者による保守点検は行わない。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：
コヴィディエンジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-998-971