

機械器具(6) 呼吸補助器  
高度管理医療機器 成人用人工呼吸器 JMDNコード: 42411000

## \*\*ニューポート ベンチレータ モデル E100 シリーズ (ニューポート レザーバーバッグ)

### 【警告】

#### <使用方法>

1. 使用前及び使用中においては各部の接続や状態を常に確認してください [正しく換気が行われない可能性があります]。

### \*\*【禁忌・禁止】

#### <使用方法>

1. 本品は設計限界以上で使用しないでください。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造等



#### (1) サイズ: 2L

<構造・構成ユニット>

- (1) クロロプレン(Chloroprene)を原材料としており、ラテックスフリー製品です。
- (2) 接続には外形22mmのコネクタを用います。
- (3) レザーバーバッグは「ニューポート ベンチレータ モデルE100 シリーズ」のほか、「ニューポート ベンチレータ モデルE150 ブリーズ」に使用します。

### \*【使用目的又は効果】

#### <使用目的>

本品は、ICU、CCU或いは一般病棟等で使用されるタイムサイクルで動作する従量式及び従圧式人工呼吸器である。

### \*\*【使用方法等】

#### 1. 使用方法に関連する使用上の注意

- (1) 患者さんの身体的条件や臨床的判断を考慮して、患者さんに適したバッグを選択してください。
- (2) 使用前にリークチェックを必ず行ってください。

### 【使用上の注意】

#### 1. その他の注意

- (1) 本品と併用するパーツや消耗品等は製造販売業者指定のものを使用してください。
- (2) \*\*本品にベトつき、ひび割れ、破損等がないか十分に点検を行ってください。
- (3) 取り付け・取り外しは、口元部分を持って行いバッグ部分を引っ張らないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- (1) 室温下(10℃～25℃)で保管してください。
- (2) 通気性の良い場所に保管してください。
- (3) 水に濡れないよう保管してください。
- (4) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なホコリが発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所を避けて保管してください。
- (5) 過度の重みがかからないように配慮してください。

#### 2. \*\*耐用期間

- (1) 20回のオートクレーブ滅菌可能。  
但し、使用条件によって異なりますが、保管方法、使用上の注意、保守・点検に係る事項に記載された事項を守ること、最大限、寿命を延ばすことができます。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用者による保守点検事項

- (1) 人工呼吸器の取扱説明書及び簡易取扱説明書に記載されているチェックリストに基づいて、保守点検作業を行ってください。
- (2) クリーニングに関するプロトコルは医療機関によって異なるため、すべてのクリーニング手順や方法について、製造販売業者がその有効性に責任を持つことや承認を行うことはできません。
- (3) クリーニングに用いる溶液や滅菌機器を使用する際には、製造販売業者の推奨を正しく守ってください。クリーニングを行う前に本品が耐性を持っているか確認してください。
- (4) オートクレーブ滅菌中はバッグを平にして、なるべく製品ループを用いて、吊るしてください。又、コネクタ接続部分で吊るさないでください。製品内部に水が混入し、破損の原因になります。
- (5) 本品は清潔ですが、出荷時に滅菌はしていません。

RS-B4NPTE10001(03)  
BZB-CVJ-F03

- (6) \*\*本品は経時的に劣化する消耗品です。定期的な交換をお勧めします。

#### (7) クリーニング

- 1) 使用後は医療用洗剤あるいはアルコールをベースとした刺激性の低い洗浄溶液を用いて洗浄します(最高90℃までの温水洗浄可能)。
- 2) 洗剤を完全にすすぎます。すすぎは滅菌蒸留水をお勧めします。すすぎ後は内部の水を抜いてください。
- 3) 洗浄後は、十分脱水し、90℃以下(最大60分)で乾燥します。
- 4) 滅菌は121℃で20分、134℃で7分、若しくは134℃で18分のオートクレーブ滅菌をします。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

コヴィディエンジャパン株式会社

カスタマーサポートセンター: 0120-998-971

外国製造業者名:

Covidien

(コヴィディエン)

アメリカ合衆国(コロラド州)

Covidien

(コヴィディエン)

アメリカ合衆国(カリフォルニア州)

販売元:

株式会社 東機貿

お問い合わせ先



電話番号: 03-5762-7252