

機械器具(6) 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ
(単回使用人工呼吸器呼吸回路、単回使用麻酔用呼吸回路、非加熱式ネブライザ) JMDN コード : 34838012

DAR プリージングシステム DAR カプノライン 300CM MM

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

<併用医療機器>

1. 本品は MR Unsafe であり、MR 検査は禁忌とする(相互作用の項参照)。

【形状・構造及び原理等】

人工鼻や麻酔回路に装着し、CO₂ をサンプリングするチューブである。

【使用目的又は効果】

本組合せ医療機器は、人工呼吸器又は麻酔器の回路に用いる器具で利便性の為、必要な医療機器を予め組合せたものである。
単回使用人工呼吸器呼吸回路・単回使用麻酔用呼吸回路は、人工呼吸器又は麻酔器から患者への空気又は酸素を含むガスの送入に用いる。

【使用方法等】

1. 保護パッケージからチューブを取り出す。
2. 患者回路に接続してあるサンプリングポートに本製品の一つのルーアコネクタを接続して締める。
3. 製品の他端ルーアコネクタをモニターに接続して締める。
4. 使用前にリークの有無や接続に異常がないことを確認する。

**【使用上の注意】

1. 相互作用

<併用禁忌(併用しないこと)>

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI 装置) (主要文献(1)参照)	MR 検査を行うときは、本品を患者に使用しないこと。	適切にチューブが機能しない可能性があるため。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光、紫外線、水濡れを避け、室温で保管すること。

2. 有効期間

有効期間は自己認証(当社データ)による。
有効期間については外装表示参照。

**【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献

- (1) 薬生機審発 0801 第 1 号・薬生安発 0801 第 4 号「植込み型医療機器等の MR 安全性にかかる対応について」(令和元年 8 月 1 日、厚生労働省)

2. 文献請求先

コヴィディエンジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-998-971

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

コヴィディエンジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-998-971

外国製造業者名：

Covidien
(コヴィディエン)
アメリカ合衆国