

電気メス用モノポーラペンシル ホルスタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用・再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

本品は、放射線滅菌済みのディスプレイ製品で、電気外科手術中、使用されていないペンシルを収納するホルスタである。


*カタログ番号 : E2400F

【使用目的又は効果】

本品は、一般的な電気手術器を用いた外科手術において組織の切開又は凝固に使用する、ペンシル型モノポーラ電極である。ホルスタは、手術中、使用していないペンシルを収納する用具である。

【使用方法等】

1. 本品を、滅菌包装から無菌的に取り出す。
2. テープを使用するか、又は下図に示すようにドレープをスロットに通すことにより、ドレープにホルスタを固定する。

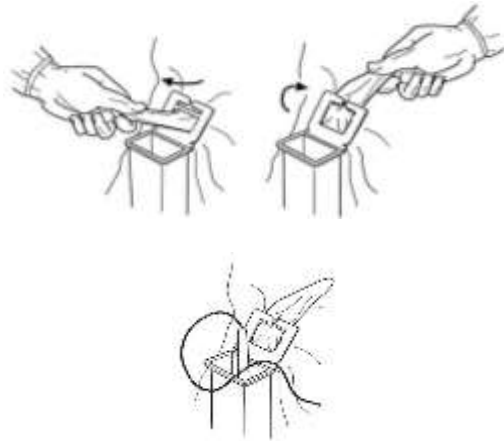

3. 使用後は廃棄する。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

本品は使用に際し、以下のような不具合及び有害事象が考えられる。

(1) 重大な不具合

- 1) ドレープにホルスタがしっかり装着されていなかった場合のホルスタ及びドレープの破損。

(2) 重大な有害事象

- 1) 破損したホルスタにペンシルを収納したことによる患者及び手術スタッフの損傷。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

有効期間は自己認証(当社データ)による。
有効期間については外装表示参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 :

コヴィディエンジャパン株式会社

カスタマーサポートセンター : 0120-998-971

外国製造業者名 :

Covidien

(コヴィディエン)

アメリカ合衆国

VL-B4HOLST03(02)