

機械器具（66）歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

歯科用練成器 Dental Plus Mixer - I


【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、専用の交換用チップ（別売品）で歯科材料等を練和又は混和する。

付属品として、ACアダプタ、混和物確認容器、混和用容器、フィルタ、専用スポイドがある。

2. 外観

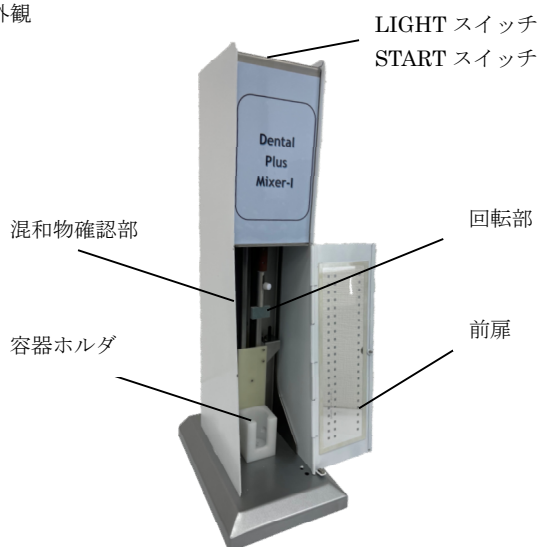

※各部の名称は、取扱説明書を参照

3. 動作原理

回転部に取り付けられる各種交換用チップを回転させ、歯科材料等を混和することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、専用の交換用チップで歯科材料を練和又は混和する。

【使用方法等】

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

1. 使用前の準備

AC アダプタの出力コネクタを本器に挿入後、電源スイッチをオンにする。

2. 交換用チップの取付方法

- 1) 前扉を開けて、回転部のレバーを上にした状態で交換用チップを装着する。
- 2) 交換用チップを装着後、レバーを下げ、チップを固定させる。

3. 回転部の回転操作

- 1) 混和用容器（50cc 容積）に混和する材料を 10cc 入れ、容器ホルダに差し込む。

- 2) 容器ホルダのつまみを上方に持ち上げ、容器ホルダを上部位置まで移動させる。この時ロックがかかることを確認する。
- 3) 前扉を閉め、START スイッチを押すと、回転部が 10 秒間回転後、自動的に停止する。
- 4) 前扉を開け、容器ホルダのつまみを下部方向に下し、容器ホルダを下部位置まで移動させる。その後、混和用容器を取り出す。

4. LED ライトによる確認操作

- 1) 処理後の混和用容器から専用スポイドで混和物確認用容器に混和物を移す。
- 2) 混和物確認容器を混和物確認部のホルダに差し込む。
- 3) LIGHT スイッチを押し、混和物確認用容器を緑色 LED ライトで処理後の混和物の状態を確認する。（10 秒間点灯）
- 4) LED ライトが消えたことを確認後、混和物確認用容器を取り外す。

5. 交換用チップの取り外し方法

- 1) 交換用チップを片手で支えながら回転部のレバーを下に下げる。
- 2) 交換用チップを下方向に引き抜く。

6. 白色 LED による回転部クリーニング

- 1) 交換用チップを装着していない状態で容器ホルダを、上記 2 項と同様に上部の定位置へ移動させ、ロックがかかることを確認する。
- 2) 前扉を閉めると白色 LED が自動的に点灯する。
- 3) 前扉を開けると白色 LED は自動的に停止する。

【使用上の注意】

1. 交換用チップの交換作業の際は、必ず電源スイッチをオフにすること。
2. ゴム手袋を装着の上、操作を行うこと。
3. 熟練した者以外は、本品を使用しないこと。
4. 本品の動作中には絶対に触れないこと。
5. 本品を設置するときには次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所に設置すること。
 - (2) 気圧、湿度、温度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分等を含んだ空気等により、悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時含む）等の安定状態に注意すること。
 - (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
保管可能な室内で保管
2. 耐用期間
5 年間

取扱説明書を必ずご参照下さい

【保守・点検に係る事項】

- ・医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にある。
- ・取扱説明書に従って、定期的に保守点検を必ず実施すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：NERVE 株式会社

TEL：059-373-5605

販売業者（問い合わせ先）：アエラスバイオ株式会社

住 所：〒650-0047

兵庫県神戸市中央区港島南町 1 丁目 3 番地 1

TEL：078-303-0031 FAX：078-304-5163

取扱説明書を必ずご参照下さい