

**2015 年 11 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2005 年 7 月改訂（第 2 版）

届出番号：13B2X00023000007

一般医療機器 医 04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

シングルパッド A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造及び原理等】

表面材：脱脂綿

**吸収材：レーヨン又はレーヨンとポリエチレンテレフタレートの

複合材・紙・高吸水性樹脂

防水材：ポリエチレン・ポリプロピレン

これらを結合剤（ホットメルト）でシート状に一体化したもの。

【使用目的又は効果】

**術後創傷の被覆・保護又は滲出液の吸収を目的としたパッド。

**【使用方法等】

(1) 本品を必要に応じて滅菌（エチレンオキシドガス滅菌）し、1

回限り使用すること。

(2) 創の大きさよりやや大きいサイズの本品を選び、本品の吸収面

（白色面）を創部に当てること。

(3) 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように

固定すること。

【使用上の注意】

**1. 重要な基本的注意

(1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場

合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) 本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に

応じ適切な交換及び処置を行うこと。

(3) 創に余分な圧力がかからない様、除圧の処置を適宜行うこと。

**2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。

・ 創の感染症状

・ 創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、
びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）

・ 固着

・ 壊死組織の増加

・ 疼痛

**3. その他の注意

防水材側を創部側に使用しないこと。（吸収しないため）

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-1

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）