

**2015年7月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

*2005年7月改定（第2版）

届出番号：13B2X00023000020

一般医療機器 医04 整形用品 11028000 コットンボール

白十字糸付き綿球（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿（綿100%）を球状に丸めたものに、糸（綿100%）をつけたもの

【使用目的又は効果】

**球状の綿繊維から成り、医薬品の塗布や、患者の体表から少量の体液を吸収する等を目的とする

【使用方法等】

*衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

本品の糸を強く引っ張ると、綿球から糸が抜けるおそれがある

**直接患部に使用するときは、滅菌して使用し、本品や繊維が患部に残らないように注意すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

**本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）