

**2015年12月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

*2005年7月改訂（第2版）

届出番号: 13B2X00023000039

一般医療機器 医 04 整形用品 34655000 医療用不織布

ハクジュウジベロット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

セルロース繊維（Lyocell）を水流により絡め布状にしたもの。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

**衛生材料として必要に応じて滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

**繊維が患部に残らないように注意すること。

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）